

Eliza S/S+

Användarhandbok Svenska



Innehållsförteckning

1. Läs först: Säkerhetsinformation	3
2. Viktig information	7
3. Förpackningens innehåll	8
4. Beskrivning av funktioner	8
5. Översikt	10
6. Installation	13
7. Kommunikationsväg	17
8. Programmering	18
9. Kontroll	19
10. Larmknapp	21
11. Allmän information	21
12. Underhåll	22
13. Tekniska data	23
14. Miljö	24
15. Tillgänglighet	27
16. Övrigt	29

1. Läs först: Säkerhetsinformation



Läs och åtlyd alltid säkerhetsinformation markerad med denna symbol.

- Testa alltid systemet i enlighet med instruktionerna före användning och testa alltid produkten efter att justeringar har gjorts.
- Enheten är inte alltid lämplig för alla användare och ska inte betraktas som ett substitut för vårdgivarens övervakningsrutiner.
- Enheten är INTE avsedd för livsuppehållande utrustning där tekniska fel kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
- Kontrollera enheten regelbundet och byt ut den vid behov.
- Användare ska vara uppmärksamma på potentiella störningar från andra system som används på samma eller närliggande radiofrekvensband.
- Luckor till fack får endast öppnas av behöriga personer i enlighet med instruktionerna i servicemanualen.



OBSERVERA

Använd endast batterier, nätadapter och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Anslutning av andra tillbehör kan vara farligt och kan upphäva typgodkännande och garanti.

- Använd endast den rekommenderade nätadapter som anges i avsnittet Tekniska data.
- Nätadaptern kan användas för att stänga av enheten. Väggtuttaget som används måste finnas i närheten av utrustningen och vara lättillgängligt.

VIKTIGT!

Enheten använder mobiltelefonnätet. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras.

1.1. Batterisäkerhet

Eliza S/S+ och larmsändaren innehåller litiumbatterier med potentiella risker om de inte används på rätt sätt eller om de skadas.



Litiumbatterier kan orsaka potentiella kemiska brännskador i samband med förtäring. Om den sväljs eller placeras inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.



Håll batterier borta från barn.

- Batteribyte får endast utföras av auktoriserade personer i enlighet med instruktionerna i avsnittet Underhåll, [se 12. Underhåll på s. 22](#).
- Använd endast batterier som rekommenderas och är avsedda för produkten.
- Använd endast den laddningsenhet och sladd som är avsedd för produkten.

- Ladda eller använd inte enheten om du märker något fel eller potentiellt problem med batteriet som lukt, färgförändring, för mycket värme, förändring i form, läckage eller konstiga ljud.
- Ta inte isär, krossa, punktera eller skada batterier.
- Förvara batterier säkert på en sval och torr plats, förvara dem i originalförpackningen eller en avsedd behållare och undvik att utsätta dem för extrema temperaturer eller fukt.
- Om en brand uppstår: Rikliga mängder med kallt vatten är ett effektivt släckmedel för litiumbatterier. Använd inte varmt eller hett vatten. Använd inte släckningsmaterial av Halontyp. Du kan använda torrt pulver, sand eller jord.



Se materialsäkerhetsdatabladet (MSDS) för ytterligare första hjälpen-åtgärder, brandbekämpningsåtgärder och annan säkerhetsinformation.



Ta omedelbart ut tomma batterier, förvara och kassera dem på rätt sätt. Mer information finns i avsnittet Miljöinformation, [se 14.1. Miljöinformation på s. 25](#).

1.2. Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler, som till exempel ett trygghetslarm, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att ta reda på om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor.

För att potentiella störningar ska förhindras rekommenderar tillverkare av medicinska implantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlös utrustning och implantat.

Stäng genast av trygghetslarmet om du misstänker att störningar har uppstått. Om du har några frågor om användningen av ditt trygghetslarm i kombination med ett medicinskt implantat ska du vända dig till din vårdgivare.

2. Viktig information

Alla system som använder radio- och nätverkskommunikation utsätts för störningar som användaren saknar inflytande över.

Produkter från Careium är konstruerade för att minimera effekterna av sådana störningar.

Trots detta måste användaren vara medveten om att systemets komponenter kan utsättas för störningar eller annan påverkan som kan leda till att de inte fungerar korrekt.

Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera att systemets alla delar fungerar överallt, detta gäller framför allt radiokommunikation. Kontakta återförsäljaren omgående vid misstanke om felfunktion.

Användare ska vara särskilt uppmärksamma på risken för störningar från produkter som kommunicerar via samma eller närliggande radiofrekvensband.

För mer information, kontakta återförsäljaren eller läs servicehandboken eller dokumentationen på www.careium.com/support/.

Enheten har ett laddningsbart batteri, vilket gör att den kan användas även vid strömavbrott. Enheten avger pipljud en kort stund efter att ett strömavbrott har inträffat. Larmcentralen meddelas vid strömavbrott och vid låg laddningsnivå. När batteriets laddningsnivå blir låg indikeras detta genom en blinkande statuslampa, *se 5.3. Indikeringslampor & symboler på s. 12.*

Strömförsörjningen från backupbatteriet säkrar driften i upp till 168 timmar för Eliza S och 72 timmar för Eliza S+.

3. Förpackningens innehåll

- Eliza S/S+
- Nätadapter
- Larmknapp med tillbehör
- Användarhandbok/Snabbstartsguide

4. Beskrivning av funktioner

Eliza S/S+ är ett digitalt trygghetslarm och en välfärdshubb. Det kan anpassas till framtida behov och anslutas till många olika tillbehör och välfärdstjänster – vilket ger användaren en skräddarsydd lösning.

Med Eliza S/S+ kan användaren kalla på hjälp om han eller hon råkar ut för en olycka eller faller i hemmet. Eliza S/S+ kan i vissa fall rädda liv om en person faller eller råkar ut för någon annan typ av olycka när han eller hon är ensam. Eliza S/S+ har en inbyggd modul för 2G-, 3G- och 4G-mobilnät. Eliza S+ kan överföra larm över bredband/nätanslutningar och mobiltelefonnät. Eliza S kan överföra larm över mobiltelefonnät.

Enheten erbjuder användaren möjligheten till tvåvägs handsfree röstkommunikation, även om användaren är långt borta från Eliza S/S+. Röstkommunikation kan användas antingen med VoIP (Voice over Internet Protocol) eller mobil kommunikation.

Enheten använder SIP, ett standardprotokoll för tal- och videoöverföring via digitala anslutningar. Utöver vanliga röstbaserade larmsamtal har Eliza S/S+ en plattform för överföring av detaljerad larminformation, intalade meddelanden, onlinestatus o.s.v.

Eliza S/S+ har ett unikt identifieringsnummer (ID) som överförs och är kopplat till personlig information som finns lagrad hos larmcentralen. Larmknappen är utformad för användning med enheten, *se 10. Larmknapp på s. 21.*

4.1. Aktivera larmet

Du kan aktivera trygghetslarmet genom att:

- trycka på knappen på en parkopplad larmsändare (tex bärbar larmknapp). Se 4.2. Larmsändare nedan.
- trycka på den inbyggda larmknappen på Eliza S/S+.

Vid aktivering ringer Eliza S/S+ upp en larmtjänst för att kalla på hjälp.

4.2. Larmsändare

Det går att koppla 50 larmsändare (larm/sensorer) till Eliza S/S+, t.ex. en larmknapp. Om ett larm inkommer från en larmsändare testas sändarens batteristatus.

4.3. Larmmottagare

Upp till 10 larmmottagare kan programmeras in. Larmet identifieras med en larmkod som är programmerad i Eliza S/S+.


Personen som tar emot larmet kan sedan tala direkt med personen som larmat för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

4.4. Andra funktioner

Ytterligare funktioner kan aktiveras eller ändras. Mer information finns i servicehandboken, du kan även kontakta återförsäljaren för mer information.


5. Översikt

5.1. Vy bakifrån

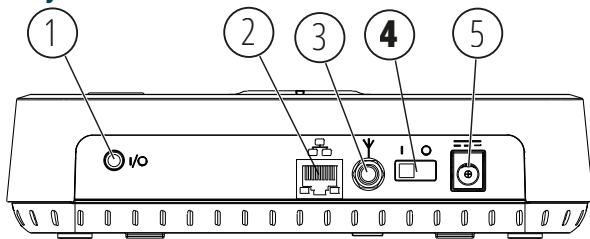

Nr. Funktion/Knapp	Beskrivning
1. In- och utgång	3,5 mm ljudutgång eller kabelingång
2. Ethernet port (endast Eliza S+)	Här ansluts Ethernet-kabeln från bredband/nätverk
3. Extern antennanslutning	För en extern antenn som är anpassad till 2G/3G/4G
4. Strömbrytare	Slår på eller stänger av Eliza S/S+
5. Uttag för nätagapter	9 V, 2 A

5.2. Sett uppifrån

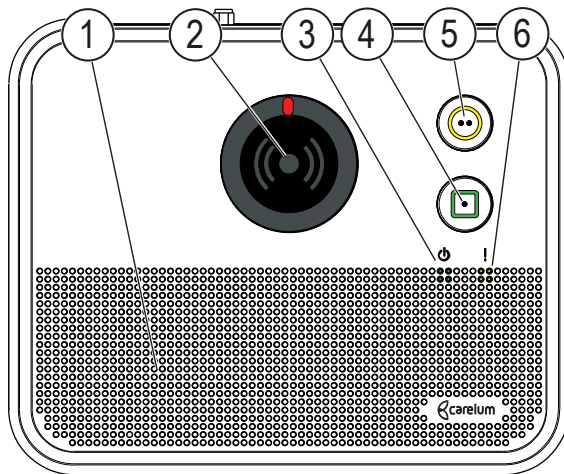

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Högtalare | 5. Knapp med cirkulär symbol (gul) |
| 2. Larmknapp | 6. Statusindikator |
| 3. Strömindikator | |
| 4. Knapp med kvadratisk symbol (grön) | |

5.3. Indikeringslampor & symboler

Nr.	Indikator	Funktion	Beskrivning
2		LARM	RÖD
		Fast sken	Normal drift
		Blinkande sken	Larm aktiverat
3		PÅ	GRÖN
		Fast sken	Strömanslutning
		Blinkande sken	Strömbortfall
4		GRÖN KVADRAT	
		Tryck för att avbryta ett larm	
5		GUL CIRKEL	GUL
			Servicemeny m.m
6		STATUS	RÖD
		Av	Normal drift
		Fast sken	Nätverksproblem
		Blinkande sken	Lågt batteri


6. Installation

6.1. Ta bort den övre luckan



OBSERVERA

Endast behöriga personer får öppna luckan. Stäng av enheten och koppla från den externa nätdaptern innan du tar bort luckan.

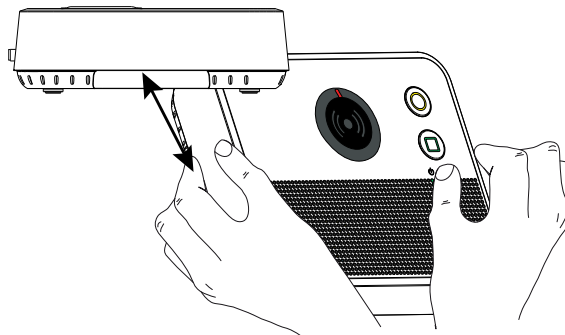

- Försäkra dig om att Eliza S/S+ är avstängd.
- För in båda händernas fingrar i skårorna på sidorna av Eliza S/S+ och dra den övre luckan försiktigt utåt och uppåt.




VIKTIGT

Böj eller vrid inte luckan för mycket eftersom den kan skadas.

6.2. Invändig vy

På bilden nedan visas enheten med den övre luckan borttagen.

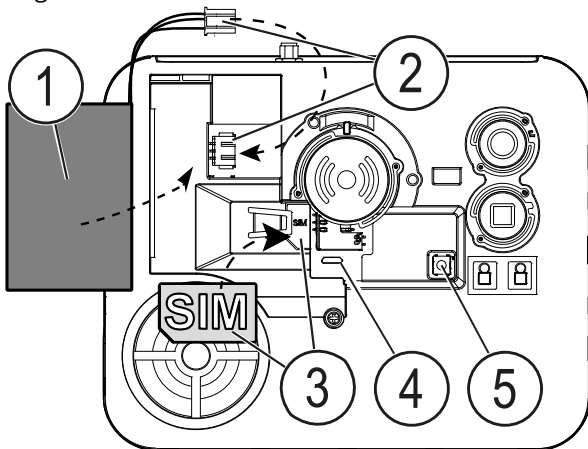

1. Batteri
2. Batterianslutning
3. SIM-korthållare
4. Underhålls-USB-port
5. Volymknapp

6.3. Installera SIM-kortet



VIKTIGT

Stäng av enheten och koppla från den externa nätadaptern innan du tar bort luckan.

- Flytta försiktigt på batteriet för att exponera SIM-kortshållaren. Om batteriet redan är installerat, var uppmärksam på om batteriet är anslutet för att kablarna inte ska skadas.
- Installera SIM-kortet så som bilden visar. Observera märkningarna.
- Ersätt eller installera batteriet.



VIKTIGT

Kontrollera alltid att batteriet är anslutet om enheten är ny eller har magasinrats.

Sätt tillbaka luckan, tryck till mellan dom tre knapparna, ett klickljud indikerar att luckan låsts ordentligt.

6.4. Anslutning

Eliza S/S+ är lätt att installera:

1. Anslut nätadaptern till vägguttaget och sätt in strömsladden i nätuttaget på enheten. Se till att enheten alltid är ansluten till elnätet.
2. Ställ strömbrytaren i läget I.
3. Kontrollera att indikeringslampan **På**  lyser med ett fast rött sken.
4. Statuslampan ska släckas inom 120 sekunder om ett mobilnätverk (GSM/UMTS/LTE) upptäcks.
5. Utför en provlarmning med Eliza S/S+.




OBSERVERA

Installationen får endast utföras av behöriga personer i enlighet med instruktionerna i servicehandboken.

7. Kommunikationsväg

Exempel på en förenklad kommunikationsväg

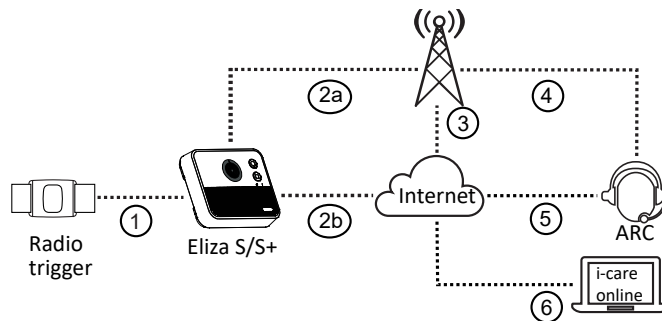

1. Radio- eller kabelanslutet larm aktiverat
2. Beroende på vald överföringsväg:
 - a. Anslutning via mobilnätverk (GSM/UMTS/LTE) (Eliza S/S+)
 - b. Fast nätverksanslutning (endast Eliza S+)
3. Dataanslutning via mobilnätverk (GSM/UMTS/LTE)
4. Röstanslutning via mobilnätverk (GSM/UMTS/LTE)
5. Dataanslutning till en digital larmcentral
6. Tillval i form av anslutning till enhetshanteringssystemet i-care® online.

8. Programmering

Kontakter, larmkoder och inställningar programmeras via enhetshanteringssystemet i-care® online www.icareonline.com eller med en dator via en webbläsare.

I vissa fall levereras enheten färdigt programmerad eller programmeras automatiskt vid uppstart
För hjälp med programmering, se servicehandboken eller kontakta återförsäljaren.

8.1. Para ihop trådlösa larm

Upp till 50 larmknappar/sensorer eller andra larmsändare kan paras ihop med Eliza S/S+.

- Håll knappen med gröna symbolen  intryckt i fyra sekunder och släpp den när en ljudsignal spelas upp och strömindikatorn  börjar blinka.
- Aktivera larmsändaren. När Eliza S/S+ tar emot radiosignalen spelas en ljudsignal upp.
- Bekräfta parningen genom att trycka ned och släppa den röda larmknappen på Eliza S/S+ en gång. Den lyckade parkopplingen bekräftas med en ljudsignal.
- Larmknappen är nu parkopplad och inställd på standardlarmtyp. Larmtypen kan när som helst ändras med tillvalstjänsten i-care® online.

Obs! Upprepa stegen ovan för att parkoppla fler larmknappar.

9. Kontroll

Kontrollera alltid att enheten fungerar som tänkt efter installation och parning. Larmen ska testas regelbundet och på ett sätt som verifierar att hela larmsekvensen från larmsändare till larmmottagare fungerar

9.1. Kontrollera täckningen

Kontrollera alltid att enheten fungerar som tänkt efter installation och parning.

- Håll knappen med gröna symbolen  intryckt i fyra sekunder.
- Tryck/aktivera larmknappen/tillbehöret. När Eliza S/S+ tar emot signalen hörs en signalton. Upprepa detta på alla områden där larmknappen/tillbehöret ska fungera.

9.2. Kontrollera mobilnätets signalstyrka

När du installerar Eliza S/S+ måste du kontrollera mobilnätets signalstyrka.

Mobilnätets signalstyrka kan också kontrolleras via: www.icareonline.com eller se 9.2.1. *Kontrollera enheten på s. 20*. För mer information se servicehandboken.

9.2.1. Kontrollera enheten

Kontrollera mobilnätets signalstyrka på enheten.

1. Tryck och håll ned knappen med gul cirkel .
2. En syntetisk röst säger: **-Service Mode (Serviceläge)!**.
3. Tryck en gång på knappen med gröna symbolen .
4. En syntetisk röst säger: **-Signal strength (Signalstyrka)!**.
5. Tryck en gång på huvudlarmknappen .
6. Den aktuella signalstyrkan presenteras av en syntetisk röst.
7. Tryck en gång på knappen med gröna symbolen .
8. En syntetisk röst säger: **-Exit (Avsluta)!**.
9. Tryck en gång på huvudlarmknappen .

***Obs!** Om det inte är möjligt att uppnå ett godkänt värde måste enheten placeras om eller en extern antenn användas.*

9.3. Automatiskt test

Funktionerna hos Eliza S/S+ och dess kommunikation kan automatiskt kontrolleras så ofta som varannan minut med hjälp av tillvalstjänsten i-care® online. Enheten kan även testas genom automatisk funktionsövervakning eller en testrapport som regelbundet skickas till larmcentralen, exempelvis en gång om dagen.

De länkade larmknapparna kan testas automatiskt genom periodiska radiotestsändningar (standard PÅ). Den är konfigurerbar och kommer att ställas in i samband med radiosändning. Resultatet kontrolleras normalt en gång om dagen beroende på inställningar.

10. Larmknapp

Larmknappen använder sig av tvåvägskommunikation. Det innebär att när Eliza S/S+ tar emot ett larm från en larmknapp skickar trygghetslarmet en bekräftelse till larmknappen på att larmet har gått fram. En bekräftelse på detta visas på larmknappen genom att indikeringslampan ändras från röd till grön. Om larmknappen inte mottar någon bekräftelse skickas larmet igen.

Man kan bära larmknappen med ett armband eller en halband.

Larmknappen är vattentätt enligt IP67 via en inbyggd tätning och kan användas i duschen och i våta miljöer.

11. Allmän information

- En kontroll av mobilnätstäckningen ska alltid utföras i samband med installationen.
- För att ett larm ska kunna sändas måste minst en larmmottagare/larmcentral programmeras in.
- Eliza S/S+ får inte komma i kontakt med vatten eller annan vätska.
- Eliza S/S+ måste vara försedd med ett mini-SIM-kort (2FF), och användaren måste ha ett lämpligt mobilabonnemang som inkluderar både röstsamtal och data.

12. Underhåll

12.1. Rengöring

Eliza S/S+ och larmknappen ska rengöras med en lätt fuktad trasa.

Använd inga andra lösningsmedel vid rengöring.

Obs! Om din gamla larmknapp börjar se sliten ut kan du beställa ett helt nytt skal för att få den att se som ny ut igen.

12.2. Övertagande

Om Eliza S/S+ övertas av en ny användare ska den återställas till standardinställningarna och omprogrammeras i enlighet med den nya användaren.

12.3. Batterihantering

Effektiv batterihantering är avgörande för tillförlitligheten hos välfärdsteknik. Periodicitet och rekommendationer för batteribyte beskrivs i den tekniska handboken. När du byter batteri är det viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna som beskrivs i avsnittet Batterisäkerhet, [se 1.1](#).

[Batterisäkerhet på s. 4](#), utbytesanvisningar i den tekniska handboken och återvinningsvägledning som beskrivs i avsnittet Miljöinformation, [se 14.1. Miljöinformation på s. 25](#).



OBSERVERA

Batteribyte får endast utföras av behöriga personer i enlighet med instruktionerna i servicehandboken

13. Tekniska data

13.1. Trygghetslarm Eliza S/S+

Beskrivning	Data
Modellnr:	A150
Mått:	170 x 138 x 43 mm (L x B x D)
Vikt inkl. nätadapter och kablar:	0,6 kg
Nätadapter:	9 VDC nätadapter
Strömförbrukning:	2 W (nominell)
Backupbatteri:	3,7 V, 2 000 mAh, litium-jonbatteri
Drifttid med backupbatteri:	Eliza S: Upp till 168 timmar Eliza S+: Upp till 72 timmar (nytt och fulladdat batteri)
Ingångar:	1 Normalt öppen (NO)
Utgångar:	Ljud
Kommunikation:	GSM 2G, UMTS/HSDPA 3G, LTE 4G, Ethernet (Eliza S+)
Radiofrekvensband:	869,2–869,25 MHz
Antal larmsändare:	Upp till 50
Utrustningsklass:	Radioutrustning Klass 1 <i>Class 1</i>

13.2. Bärbar larmknapp, Enzo

Beskrivning	Data
Mått:	39 x 32 x 11 mm (L x B x D)
Vikt	12 g (exklusive handledsrem eller halsrem)
Batteri:	3 V litiumbatteri CR 2032
Batterilivslängd:	Upp till fem år
Vattentålighet:	Enligt kapslingsklass IP67
Radiofrekvensband:	869,2–869,25 MHz
Radiofrekvenseffekt:	max. 10 mW (10 dBm)
Radoräckvidd: inomhus utomhus	≥ 40 meter (normal miljö) ≥ 300 meter (typisk, siktlinje)

14. Miljö

Denna produkt är avsedd för inomhusbruk i normal bostadsmiljö.

Beskrivning	Data
Omgivningstemperatur:	5 °C (41 °F) till 35 °C (95 °F)
Luftfuktighet:	0 till 75 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Miljöklass:	1 (EG-I)

14.1. Miljöinformation

Denna produkt överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i EU- och Storbritannien.

Dessa föreskrifter reglerar produktansvaret för förpackningar, elektronik och batteriåtervinning i syfte att öka återvinningen och minimera avfallet.



Produkten är märkt med den överkorsade soptunnan, som anger att den ska lämnas in för återvinning. Produkten kan returneras kostnadsfritt till en återvinningsstation som är ansluten, direkt eller via ett återvinningssystem, till Careium eller till din distributör.

För detaljerade instruktioner, deklarationer och överensstämmelseinformation, kontakta din distributör eller besök vår webbplats, www.careium.com. Använd nedanstående QR-koder för att nå respektive produktinformation.

Eliza S



Eliza S+



14.2. Ekodesign

Denna produkt uppfyller tillämpliga ECO-designföreskrifter. Den fullständiga informationen om ekodesignkraven finns tillgänglig på följande internetadress:

www.careium.com/ecodesign

14.2.1. Externa nätaggregat

Beskrivning	Data
Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress.	Tenpao International. Room 10-11,6/F., Kwong Sang Hong Centre, 151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, HongKong
Modellbeteckning	S018BAM0900200
Ingående spänning	100-240 VAC
Ingående frekvens (växelström)	50-60 Hz
Utgående spänning	9 VDC
Utgående ström	2 A
Utgående effekt	18 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	86,64 %
Verkningsgrad vid låg last (10 %)	84,12 %
Elförbrukning vid noll-last	0,057 W

14.2.2. Standby och off mode

Produkten är nätverksansluten med funktionalitet med hög nätverkstillgänglighet (HiNA).

- Trådlösa nätverksportar kan avaktiveras genom mjukvarukonfiguration

For more information se: www.careium.com/ecodesign

15. Tillgänglighet

Careium har åtagit sig att säkerställa tillgänglighet för användare med funktionsnedsättningar. Vi förbättrar kontinuerligt användbarheten för alla och tillämpar tillämpliga delar av relevanta tillgänglighetsstandarder.

15.1. Åtgärder för att stödja tillgängligheten

Careium har ett brett utbud av produkter och tjänster för att stödja och bibehålla självständighet när tillståndet förändras. Du kan välja mellan olika produkter som passar dina individuella behov. Eliza är utformad för att fungera med och vara kompatibel med olika hjälpmedel. En fullständig lista över kompatibla tillbehör finns i tillbehörsavsnittet och på vår hemsida, www.careium.com. Respektive tillbehörsdokumentation och produktsupport förklarar hur du använder tillgänglighets- och kompatibilitetsfunktionerna.

Denna manual är utformad för att uppfylla tillgänglighetskrav och för att läsas av skärmläsare och andra text-till-tal-applikationer.

Du kan också kontakta Careium, ditt inköpsställe eller organisationen som levererade och installerade produkten för att få support som är anpassad till dina behov.

15.2.Feed-back

Vi välkomnar din feedback om tillgängligheten till Careiums produkter och tjänster. Vänligen meddela oss om du stöter på några tillgänglighetshinder.

- Telefon: +46 (0)10 4829000
- E-post: support.care@careium.com
- Postadress: Careium Sweden AB, Jörgen Kocksgatan 1B, 211 20 Malmö, Sweden

15.3.Tillbehör

Lista över kompatibla hjälpmedel för tillgänglighet

- Blow switch – Blåsaktiverad brytare
- Ping Pong switch – Lättaktiverad brytare
- Pullcord – Dragaktiverad brytare
- PikoButton – Lättaktiverad brytare
- Pill Dispenser – Stödjer medicinering och att komma ihåg medicinering

Andra tillgängliga hjälpmedel kan variera från region till region och hjälpmedel från tredje part kan anslutas till Elizas ingång eller utgång, till exempel vissa hörapparatförstärkare.

Besök vår hemsida på www.careium.com, fråga vår helpdesk eller din leverantör för mer information och support.

16. Övrigt

16.1. EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar Careium Sweden AB att denna radioutrustning är i överensstämmelse med RE-direktivet 2014/53/EU samt andra tillämpliga föreskrifter i EU- och Storbritannien. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på: webbadress:

www.careium.com/dofc.

16.2. Juridisk information

Informationen här kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för Careiums produkter och tjänster anges i de uttryckliga garantiförklaringarna. Ingenting häri ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti.

Careium ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden häri.

A150 (Eliza S/S+)

Svenska
eliza-s-eliza-s-plus-trygghetslarm-anvandarhandbok-v19-careium-sv
©2026 Careium AB. Med ensamrätt.

www.careium.com

