

Abby



MOBIEL SOCIAAL ALARM

Gebruikershandleiding

Nederlands



Inhoud

1	Veiligheidsinformatie	3
2	Belangrijke informatie	3
2.1	Medische apparatuur.....	4
2.1.1	Medische implantaten.....	4
2.2	Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate).....	4
3	Inhoud van de verpakking.....	5
4	Beschrijving	5
5	Alarmen	6
5.1	Noodalarm.....	6
5.2	Valalarm	6
5.3	Geofence-alarm.....	6
5.4	Alarm thuis/weg	7
5.5	Technische alarmen.....	7
6	Positionering	7
7	Een bericht naar een contactpersoon verzenden	8
8	De Abby en het dockingstation, achter-, voor- en zijaanzicht	8
9	Schema met toetsen, display, lampjes, geluid en trillingen.....	9
9.1	Display	9
9.2	Menusysteem.....	9
9.3	Abby, het op het lichaam gedragen apparaat.	10
9.4	Abby, dockingstation.....	11
10	Installatie.	11
11	Radioactivering (accessoire)	13
12	Radioactivering koppelen.....	13
13	Ondersteunde accessoires voor de Careium-radio.	13
14	Onderhoud.....	13
14.1	Reiniging.....	13
15	Opnieuw instellen	14
16	Technische gegevens	14
16.1	Abby, het op het lichaam gedragen apparaat.	14
16.2	Laadstation/Baken	15
16.3	Voeding.....	15
16.4	Omgeving.....	15
17	Milieu-informatie.....	15
17.1	Producten op de juiste manier afdanken.....	16
17.2	De batterijen in dit product op de juiste manier afdanken.....	17
18	Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring.....	17
19	Conformiteitsverklaring Verenigd Koninkrijk.....	17

1 Veiligheidsinformatie

- Gebruikers moeten extra goed letten op het risico van storing door andere systemen die in dezelfde frequentieband of aangrenzende frequentiebanden werken.
- De Abby kan en mag niet uit elkaar worden gehaald.
- Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst. Het is niet toegestaan om dit product te demonteren, te doorboren, kortsluiting van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen hoger dan 60 °C (140 °F), het bloot te stellen aan extreem lage luchtdruk, of in vuur of water te gooien om de kans op brand of brandwonden te voorkomen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften of de referentiehandleiding die bij het product wordt geleverd.
- Gebruik uitsluitend de aanbevolen voeding die in het deel Voeding wordt vermeld.
- Het stopcontact moet in de buurt van de Careium-oplader zijn geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het apparaat altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan, of als het storing of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de gewone gebruiksstand. Het apparaat mag nooit worden gebruikt bij een bedrijfstemperatuur hoger dan 40 °C of lager dan -10 °C.

2 Belangrijke informatie

Alle systemen die gebruikmaken van radio- en netwerkcommunicatie zijn onderhevig aan storing waarover de gebruiker geen controle heeft.

Producten van Careium zijn ontworpen om de impact van dergelijke verstoringen te minimaliseren. De gebruiker moet er echter rekening mee houden dat systeemcomponenten onderhevig kunnen zijn aan storing of andere invloeden die een slechte werking kunnen veroorzaken.

Het is daarom belangrijk om regelmatig te controleren of alle onderdelen van het systeem in alle ruimtes werken, met name de radiocommunicatie. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als u een slechte werking vermoedt.

Houd het product uit de buurt van storende apparaten zoals radiozenders, mobiele telefoons, DECT-telefoons of draadloze hoofdtelefoons.

Gebruikers moeten met name alert zijn op het risico van storing door producten die op dezelfde of aangrenzende frequenties communiceren.

Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier.

2.1 Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het apparaat tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

2.1.1 Medische implantaten.

Fabrikanten van medische implantaten raden een minimale afstand van 15 cm tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat aan om mogelijke storing te voorkomen. Personen die dit soort apparaten hebben, moeten zich aan het volgende houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat.

Als u vermoedt dat er sprake van storing is, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen. Raadpleeg uw zorgverlener als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een medisch implantaat.

2.2 Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat het de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door de internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) worden aanbevolen, niet overschrijdt. De blootstellingsrichtlijnen voor radiogolven gebruiken een maateenheid die bekend staat als de specifiek absorptietempo of SAR.

De SAR-limiet voor mobiele apparaten is gemiddeld 2 W/kg op 10 gram weefsel en heeft een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd of gezondheid. Tests voor het bepalen van SAR worden uitgevoerd in de normale gebruiksposities, waarbij het apparaat met het maximaal gecertificeerde vermogen uitzendt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

SAR lichaam: 1,605 W/kg

Bij normaal gebruik liggen de SAR-waarden voor dit apparaat ver beneden de hierboven genoemde waarden. Het uitgangsvermogen van uw mobiele apparaat wordt automatisch verlaagd als volledig vermogen niet nodig is voor de oproep, om de efficiëntie van het systeem te verbeteren en

storing op het netwerk zo beperkt mogelijk te houden. Hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

3 Inhoud van de verpakking

- Abby
- Laadstation/baken
- Voeding
- Draagkoord
- Snelstartgids

4 Beschrijving

De Abby is een klein en comfortabel mobiel sociaal alarm met gps dat de veiligheid niet alleen thuis verbetert, maar overal waar de gebruiker naartoe gaat. Het apparaat is altijd eenvoudig mee te nemen, in een zak of als hanger rond de nek, en is waterdicht (IP67). Wanneer de noodhulpknop wordt ingedrukt, wordt er een alarm naar de centrale gestuurd en via de ingebouwde luidspreker kan de gebruiker met het opgeleide personeel van de alarmcentrale praten. De Abby ondersteunt verschillende Careium-accessoires met behulp van het 869 MHz-protocol. Er kan bijvoorbeeld een Enzo-alarmactivator worden gebruikt om een alarm op afstand van het hoofdproduct te activeren. De functies voor gps-, wifi- en bakenpositionering werken allemaal samen om de positie van de gebruiker door te geven en het apparaat beschikt over geavanceerde volg- en geofencing-functies met energiebesparende technologie voor een lange batterijduur. Een mobiel sociaal alarm maakt het voor de senior gemakkelijker om een actieve levensstijl te behouden. Het alarm moet worden doorgestuurd naar een alarmcentrale, een familielid of zorgpersoneel. De dienst kan als sociaal alarm of als gps-trackingalarm worden ingesteld. Een mobiel sociaal alarm stimuleert en helpt de senior om actief te blijven en vrij buitenshuis te bewegen, terwijl hij of zij zich tegelijkertijd veilig voelt.

5 Alarmen

5.1 Noodalarm

Dit alarm kan met de noodoproepknop aan de voorkant van het apparaat of een alarmactivator op afstand worden geactiveerd. Het alarm op de Abby kan worden geactiveerd door drie keer achter elkaar kort of 3 seconden lang op de toets te drukken. Als u één keer op de toets drukt, wordt de alarmactivator op afstand geactiveerd.

5.2 Valalarm

Het valalgoritme dat in het apparaat is ingebouwd, heeft twee gevoeligheidsniveaus: hoog of normaal.

Als het apparaat een val registreert, controleert het gedurende 30 seconden na de val op beweging of stappen. Als er binnen deze periode beweging of stappen worden geregistreerd, zal het apparaat het valalarm annuleren. Dit proces verloopt op de achtergrond, dus de gebruiker merkt niet dat het apparaat een val heeft geregistreerd en het alarm daarna heeft geannuleerd.

Als het apparaat een val registreert, wordt de gebruiker daarna gedurende 30 seconden om de seconde gewaarschuwd met een pieptoon. Tijdens deze 30 seconden kan het valalarm door de gebruiker worden geannuleerd door op de zijknop te drukken.

NB! Een vals alarm wordt geannuleerd als er na de val beweging wordt gedetecteerd. Als het apparaat op een hard oppervlak, zoals een tafel, wordt geplaatst en dan niet wordt verplaatst, kan er een vals alarm worden gegenereerd.

5.3 Geofence-alarm

Bij de Abby kunnen twee soorten Geofence-alarmen worden ingesteld.

Het Geofence-gebied moet zodanig worden gedefinieerd dat het doel, zoals een huis of een meer, zich in het midden van het gebied bevindt. De straal van het gebied moet minimaal 100 m zijn.

- Geofence-alarm IN.
 - Als het apparaat in dit geofence-gebied komt, wordt het alarm geactiveerd
 - Er kunnen maximaal drie IN-zones voor Geofences worden ingesteld.
- Geofence OUT
 - Als het apparaat buiten dit geofence-gebied gaat, wordt er een alarm verzonden
 - Het baken moet zich binnen dit geofence-gebied bevinden.
 - Er kan één OUT-zone voor Geofences worden ingesteld.

5.4 Alarm thuis/weg

Het apparaat kan zo worden ingesteld dat er een alarm wordt verzonden wanneer de gebruiker binnen of buiten het bereik van het baken komt. Zorg ervoor dat het baken/de houder in het midden van het gebouw is geplaatst en voldoende dekking heeft om onnodige waarschuwingen te voorkomen.

5.5 Technische alarmen

- Inschakelen
- Alarm uitschakelen
- Alarm voor laag batterijniveau
- Alarm voor kritisch laag batterijniveau (EOL-alarm)
- Alarm batterij vol
- Alarmen transmissie testen
- Alarm voor batterij van accessoire bijna leeg

6 Positionering

De positie van het apparaat kan op 4 manieren worden bepaald. Gps, wifi, LBS en via het baken.

Als het apparaat in beweging is, bepaalt het apparaat elke 80 seconden of 3 minuten de positie, afhankelijk van de bewegingssnelheid.

Als het apparaat stilstaat en dus niet beweegt of zich binnen het bereik van een geregistreerd baken bevindt, zal het apparaat de positie niet bepalen

De definitie van stilstaand is 7 minuten zonder beweging. Beweging wordt door de versnellingsmeter in het apparaat bepaald.

Positionering met behulp van satellieten heeft de hoogste prioriteit. De nauwkeurigheid is vaak ongeveer 10-100 m.

De wifipositie wordt bepaald door 2 of meer mac-adressen die worden verkregen van omliggende wifinetwerken. De nauwkeurigheid is vaak ongeveer 10-100 m.

De positie van het LBS-station wordt door het aangesloten basisstation bepaald. Deze positie is niet nauwkeurig en moet meer als een indicatie van de locatie worden beschouwd.


Baken. Als er een geregistreerd baken binnen bereik is, gebruikt het systeem de geregistreerde positie als locatie.

Belangrijk: Verplaats het baken/de houder niet naar een nieuwe locatie als het adres nog niet in het beheersysteem is aangepast. Anders kan de positie-informatie die wordt weergegeven bij een alarm verkeerd zijn.


7 Een bericht naar een contactpersoon verzenden

Het apparaat kan een contactverzoek sturen naar gebruikers die met de i-care plus-toepassing zijn verbonden. Het bericht wordt verzonden door op de zijknop op het apparaat te drukken. Er wordt een geluid en een trilsignaal afgespeeld om te bevestigen dat het bericht wordt verzonden.

8 De Abby en het dockingstation, achter-, voor- en zijaanzicht

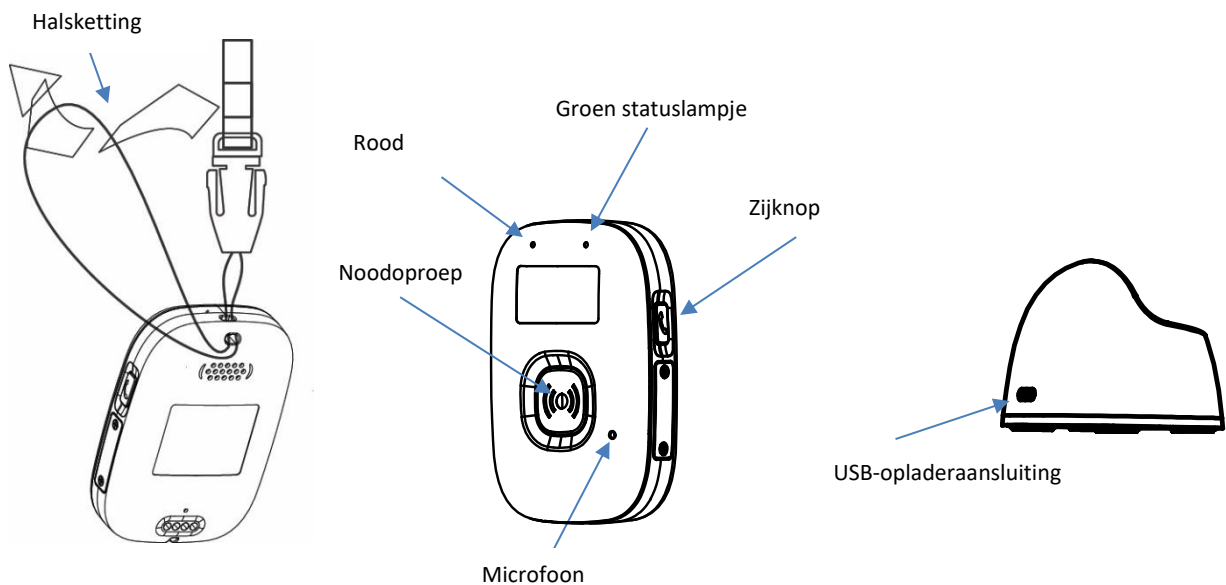

Elk indicatielampje kan slechts één kleur hebben, maar wel met verschillende patronen knipperen, afhankelijk van de status. Voorbeeld met alle drie indicatielampjes geactiveerd.

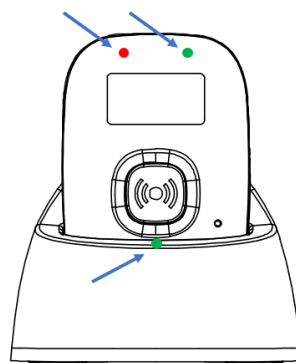

9 Schema met toetsen, display, lampjes, geluid en trillingen

9.1 Display

- Type netwerk
- Netwerksignaalsterkte
- Bluetooth actief
- Thuisbaken binnen bereik
- Batterijstatus
- Tijd
- Stappenteller



Alarm actief




Bericht verzonden




Volledig opgeladen batterij




Batterij bijna leeg

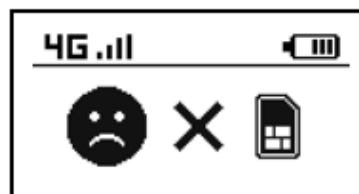


Fout simkaart

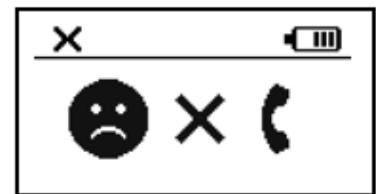

Geen netwerkverbinding

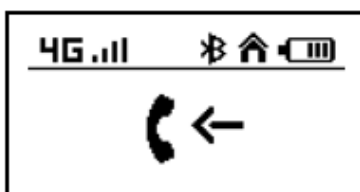

Inkomende oproep

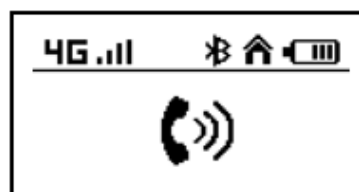

Uitgaande oproep

9.2 Menusysteem

In het menusysteem kunt u het volgende doen.

- Accessoires voor sociale alarmen koppelen
- QR-code voor koppeling met i-care plus-toepassing (wordt nog niet ondersteund in I-care plus)
- In-/uitschakelen
- Bluetooth-accessoire koppelen (wordt nog niet ondersteund)

Als u het menusysteem wilt openen, drukt u 3 seconden lang gelijktijdig op de zij- en noodoproepknoppen.

In het menusysteem

- Gebruik de zijknop om omlaag te bladeren.
- Gebruik de noodoproepknop voor bevestigen/invoeren.

Als er niets in het menu wordt gedaan, sluit het apparaat het menusysteem na 10 seconden automatisch af.

9.3 Abby, het op het lichaam gedragen apparaat.

Status/functie	Invoer	Groen lampje	Rood lampje	Geluid	Trillingen
Inschakelen	Druk 3 seconden op de zijknop of plaats het apparaat in de lader.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Lange trilling
Ruststand	N.v.t.	Knippert elke 3 sec. kort	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Opladen	N.v.t.	Knippert lang om de 3 seconden	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Volledig opgeladen	N.v.t.	Brandt	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Alarm (geen vertraging)	Noodoproepknop, 3 sec indrukken of 3 keer kort indrukken	Knippert kort totdat de oproep is verbonden	Knippert kort totdat de oproep is verbonden	Alarmtoon tot ontvangst van instructie van server	Trillen tot ontvangst van instructie van server
Alarm (vertragingsperiode)	Noodoproepknop, 3 sec indrukken of 3 keer kort indrukken Druk lang op de zijknop om te annuleren	Knippert kort totdat de oproep is verbonden	Knippert kort totdat de oproep is verbonden	Alarmtoon gedurende 30 sec. tot geannuleerd of tot ontvangst instructie van server	Trillen gedurende 30 sec tot annuleren ^o of tot ontvangst instructie van server
Alarm actief	N.v.t.	Knippert tegelijkertijd groen en rood elke 1 seconde		N.v.t.	N.v.t.
Valalarm	Annuleren: Zijknop	Knippert kort totdat de oproep is verbonden	Knippert kort totdat de oproep is verbonden	Tijdens annuleringsperiode, 30 sec.: Pieptoon 1/s. Daarna alarmtoon	Tijdens annuleringsperiode, 30 sec.: Korte trilling 0,2 sec, 0,6 sec UIT, 1,2 sec. Daarna 3 sec trillen.
Mobiel netwerk niet beschikbaar / Ongeldige simkaart	N.v.t.	N.v.t.	Knippert kort rood 0,8 sec binnen 3 sec	N.v.t.	N.v.t.

Gegevensverbinding mislukt	N.v.t.	N.v.t.	Knippert kort rood 1,2 s binnen 3 s	N.v.t.	N.v.t.
Laag batterijniveau (< 20%)	N.v.t.	Brandt niet	Knippert kort rood 0,3 sec binnen 3 sec	Pieptoon + trilling tegelijkertijd	
Inkomende oproep	Beantwoorden: Noodoproepknop	N.v.t.	N.v.t.	Belsignaal	Trillingen
Contactbericht naar app (alarm zijknop)	Zijknop lang in Normale toestand	N.v.t.	N.v.t.	Korte toon°Bij serverreactie OK	Eén keer kort trillen
Display inschakelen	Kort drukken op zijknop OF noodoproepknop	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Batterij is leeg	Batterij <2%	N.v.t.	Brandt totdat het apparaat helemaal is uitgeschakeld	N.v.t.	Lang trillen 2 sec
Geen simkaart	Simkaart wordt niet herkend	N.v.t.	Knippert kort rood 0,8 sec binnen 3 sec	N.v.t.	N.v.t.


9.4 Abby, dockingstation.

Status/functie	Groen lampje
Voeding aangesloten	Knippert
Geen voeding	Uit


10 Installatie.

Wanneer de Abby voor het eerst in het stopcontact of na opslag wordt aangesloten, moet u het apparaat tot 3 uur laten opladen om de volledige batterijcapaciteit te bereiken.

Monteer de juiste stekker op de voedingsadapter

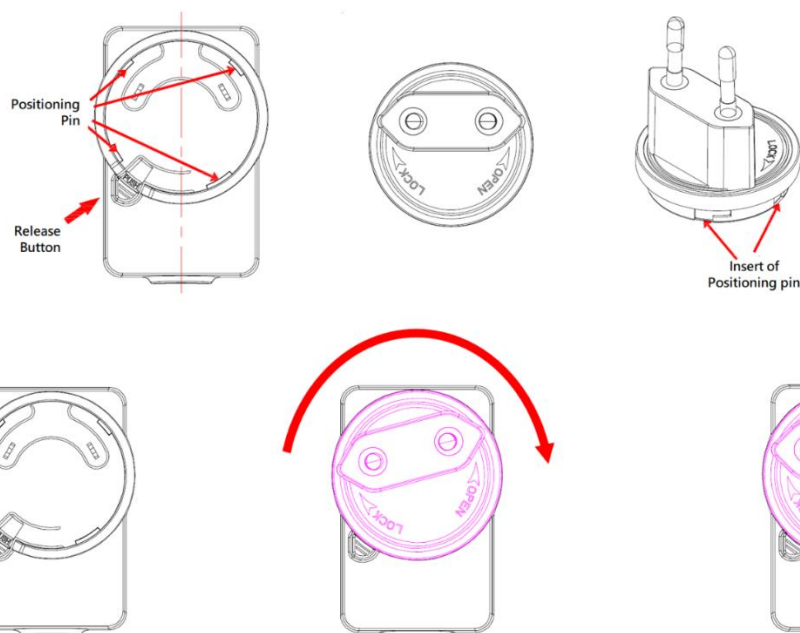

Sluit de voeding aan op het stopcontact en de USB-connector op het Abby-dockingstation. Het groene lampje op het dockingstation gaat branden en het display geeft een laadsymbool weer.

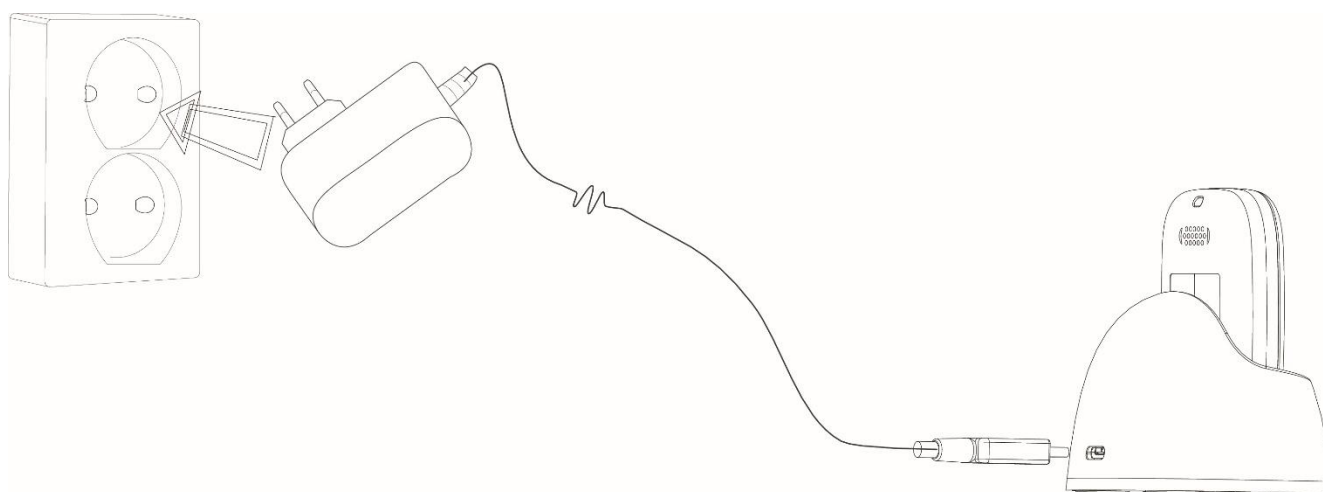

- Plaats de Abby in het dockingstation.
- NB! De Abby start automatisch op wanneer het apparaat in het dockingstation wordt geplaatst. Als de Abby volledig leeg is, kan dit enkele minuten duren
- Het lampje knippert elke paar seconden twee keer rood totdat het apparaat met het netwerk is verbonden. Na ongeveer 30-60 seconden begint het lampje groen te knipperen en kan het apparaat in i-care-online worden geconfigureerd. (Opmerking! Als de accu volledig is opgeladen, brandt het groene lampje)

11 Radioactivering (accessoire)

De radioactivering maakt gebruik van tweewegcommunicatie, dus wanneer de Abby een alarm van een radioactivering ontvangt, stuurt het apparaat een ontvangstbevestiging naar de radioactivering. Dit wordt op de radioactivering bevestigd door het wijzigen van het rode naar het groene controlelampje. Als de radioactivering geen bevestiging ontvangt, wordt het alarm herhaald. De radioactivering kan worden gedragen met behulp van een polsband of nekband. De radioactivering is waterbestendig volgens IP67 door een geïntegreerde pakking en kan zowel onder de douche als in een natte omgeving worden gedragen.

12 Radioactivering koppelen

1. Druk 3 seconden lang gelijktijdig op de zijknop en de noodoproepknop
2. Druk twee keer op de noodoproepknop
3. Druk op de knop van de sociaal-alarmactivator
4. De Abby laat een pieptoon horen en bevestigt de koppeling op het display.
5. Druk op de noodoproepknop om te bevestigen.
6. Wacht 10 seconden totdat het apparaat weer in stand-by staat

Voer altijd een testgesprek met behulp van de radioactivering nadat deze is gekoppeld om te controleren of dit goed werkt.

13 Ondersteunde accessoires voor de Careium-radio.

- Enzo
- Elliot
- Vibby
- I10 Smoke
- I10 Heat
- I10 CO

14 Onderhoud

14.1 Reiniging

Gebruik alleen een licht bevochtigde doek om de Abby, inclusief accessoires en kabels, schoon te maken. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen bij het reinigen.

15 Opnieuw instellen

Als de Abby voor een nieuwe gebruiker opnieuw moet worden ingesteld, moet het toestel op de standaardinstellingen worden gezet en opnieuw worden geprogrammeerd volgens de gegevens en vereisten van de nieuwe gebruiker.

16 Technische gegevens

16.1 Abby, het op het lichaam gedragen apparaat.

Afmetingen:	63 x 44 x 17 mm (L x B x H)
Gewicht:	45 g
IP-klasse:	IP67
Temperatuur:	Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +40 °C
Stroomverbruik (typisch):	
- Uit-modus:	0,8 mW
- Oproepmodus:	2 W
- Netwerk stand-by:	16 mW
Batterij:	Li-ION, 3,7 V, 950 mAh, 3,5 Wh
Stand-bytijd:	afhankelijk van de toepassing, netwerksituatie en instellingen. Tot 5 dagen
Gesprekstijd:	GSM900: 253 mA, 4 uur WCDMA: 495 mA, 2 uur LTE VoLTE: 120 mA, 7 uur
Alarmprotocol:	SCAIP, TS 50134-9 en spraakoproep
Categorie radio-ontvanger:	1
Simkaartinterface:	Nano SIM

Cellulaire banden

Technologie	Band
GSM (2G)	GSM-900/1800
WCDMA	B1, B8
FDD	B1/B3/B7/B8/B20/B28A
TDD	38/40/41

Wifi: de wififunctie wordt alleen gebruikt om locatiegegevens te verkrijgen, deze verzendt geen signalen.

16.2 Laadstation/Baken

Afmetingen: 58 x 68 x 50 mm (L x B x H)
Gewicht: 38 g
Kleur: Blauw
RFID, zender: 866 MHz
USB: Micro USB-C (bestemd voor gecertificeerde Careium-adapters)

16.3 Voeding

Model (EU/UK): TPQ-236A050100VW01
Ingangsspanning: 100-240 V
Frequentie ingangswisselstroom: 50-60 Hz
Uitgangsspanning: 5,0 V DC
Uitgangsstroom: 1,0 A
Uitgangsvermogen: 5,0 W
Kabellengte: 1,5 m vaste kabel
Interface: USB-C mannelijk


16.4 Omgeving

Het apparaat heeft IP-klasse 67 en is bestand tegen stofdeeltjes en water gedurende maximaal 30 minuten.

Het laadstation/het baken heeft geen IP-classificatie, en moet binnen en in een droge omgeving worden bewaard.

17 Milieu-informatie

Dit product voldoet aan de milieuvoorschriften zoals vermeld in de EU- en VK-conformiteitsverklaring en de batterijrichtlijn 2006/66/EG en de richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Meer informatie over ECO-design is beschikbaar op: www.careium.com/ecodesign. Careium is gecertificeerd volgens de internationale milieunorm ISO 14001. Careium ondersteunt ook de

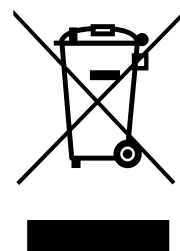

wereldwijde doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling. Lees meer over wat wij op het gebied van duurzaamheid doen op: www.careium.com/en-gb/about-careium/about-us/sustainability/. De Abby is voorzien van het logo met de doorgekruiste afvalcontainer, wat aangeeft dat het apparaat moet worden ingeleverd voor recycling.

Het product kan kosteloos worden ingeleverd bij een recyclingstation dat, rechtstreeks dan wel via een recyclingsysteem, in verbinding staat met Careium of met uw distributeur. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of kijk op onze website, www.Careium.com/care/

NB! De AEEA-informatie en aanwijzingen voor recycling gelden alleen voor lidstaten van de Europese Unie. Raadpleeg in andere landen de plaatselijke wetgeving of neem contact op met de distributeur.

De materialen die zijn gebruikt in de nekband voldoen aan de veiligheidseisen voor textiel van Oeko-Tex-norm 100.

17.1 Producten op de juiste manier afdanken



(Elektrisch en elektronisch afval)

(Van toepassing in landen met speciale inzamelsystemen)

Dit symbool op het product zelf, de accessoires of de gebruiksaanwijzing betekent dat het product en de elektronische accessoires (zoals opladers, headsets en USB-kabels) niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Deze onderdelen moeten afzonderlijk worden gesorteerd en gerecycled om duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen, zodat schade aan het milieu en de menselijke gezondheid wordt voorkomen. Voor vragen over hoe en waar deze producten moeten worden gerecycled, moeten particulieren contact opnemen met het verkooppunt of hun gemeente. Bedrijven moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden in de aankoopdocumentatie lezen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden gecombineerd met ander bedrijfsafval. Dit product voldoet aan de RoHS-richtlijn. Juist afdanken van de batterijen in dit product (van toepassing in landen met speciale inzamelsystemen) Dit symbool op de batterij, in de handleiding of in de verpakking geeft aan dat de batterij in het product niet mag worden afgevoerd als gewoon huishoudelijk afval. Wanneer de chemische aanduidingen Hg, Cd of Pb worden gebruikt, betekent dit dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat dat de referentieniveaus van de EU-batterijrichtlijn 2006/66 overschrijdt. Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. De batterijen moeten afzonderlijk worden afgevoerd en gerecycled door ze in de gemeentelijke batterijcontainer te plaatsen, om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik te bevorderen.

17.2 De batterijen in dit product op de juiste manier afdanken



(Van toepassing in landen met speciale inzamelsystemen)

Dit symbool op de batterij, in de handleiding of in de verpakking geeft aan dat de batterij in het product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens of voor het milieu.

18 Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Careium Sweden AB dat deze radioapparatuur in overeenstemming is met RE-richtlijn 2014/53/EU, RoHS-richtlijn 2011/65/EU, verpakkingsrichtlijn 94/62/EG, REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, verordening (EG) nr. 2019/1782 en verordening (EG) nr. 1275/2008 in overeenstemming met de Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op:

www.careium.com/dofc.

19 Conformiteitsverklaring Verenigd Koninkrijk

Hierbij verklaart Careium dat de radioapparatuur van het type Abby aan de relevante wetgeving van het Verenigd Koninkrijk voldoet.



© 2021 Copyright Careium AB

Manual_Abby_nl_11

Careium AB, Jörgen Kocksgatan 1 B, 211 20 Malmö, Zweden

Bedrijfsidentificatienummer: 556569-9740

www.careium.com

