

Olemme integroineet tähän laitteeseen radiovastaanottimen langattomaan tiedonsiirtoon laitteen ja turvpuhelimen välillä. Jotta laite voi lähettää hälytyksen turvpuhelimen kautta, niistä on muodostettava laitepari.

Radiovastaanottimen ja turvpuhelimen yhdistäminen laitepariksi

1. Kytke virta tukiasemaan (CONNECT-iT).
2. Käynnistä epilepsiahälytys (companion mini): Paina kynällä upotettua TEST-painiketta. "ALARM"-valo alkaa vilkkua.
3. Käynnistä perusyksikkö painamalla kynällä upotettua "PAIR"-painiketta. "POWER"-merkkivalo alkaa palaa vihreänä. Odota, kunnes epilepsiahälyttimen "ALARM"-valo lakkaa vilkkumasta.
4. Aloita pariliitostila turvahälytyksessä: Katso ohjeet turvahälyttimen käsikirjasta.
5. Epilepsia-anturissa yhdistäminen: Paina epilepsiahälyttimen TEST-painiketta. "ALARM"-valo alkaa vilkkua. Napauta laitetta lähettääksesi testi-hälytyksen. Odota turvahälyttimen vahvistusääntä.
6. Kun kuulet vahvistusäänen: paina turvahälyttimen hälytyspainiketta vahvistaaksesi epilepsiahälytyksen yhdistämisen. Kuuluu toinen vahvistusäänimerkki.
7. Kun epilepsia-anturissa "ALARM"-valo on lakannut vilkkumasta, konfigurointi on valmis.

Katso turvpuhelimen käyttöohjeesta lisätietoja turvpuhelimen yhdistämisestä laitepariksi radiovastaanottimen kanssa.

Hälytyksen testaaminen pariyhteyden muodostuksen jälkeen

Epilepsia-anturissa; Simuloi liikettä ravistamalla epilepsiahälytystä. Tarkista, että hälytys on vastaanotettu hälytyskeskuksessa

Näin se toimii

1. Kun hälytys laukeaa laitteessa, radiovastaanotin lähettää hälytyksen turvpuhelimeen.
2. Turvpuhelin välittää hälytyksen hälytyskeskukseen tai toiseen vastaanottiin.

Akun varauksen hälytys

Laitte hälyttää automaattisesti akun varauksen ollessa vähissä. Vaihda akku mahdollisimman pian, kun akun varauksen vähäisyydestä on ilmoitettu.

Ce dispositif se compose d'un émetteur-récepteur radio intégré dédié à la communication sans fil entre le dispositif et l'appareil de téléassistance. Afin que le dispositif puisse envoyer des alarmes par l'intermédiaire de l'appareil de téléassistance, il convient de les appairer.

Procédure d'appariement de l'émetteur-récepteur radio et de l'appareil de téléassistance

1. Connectez l'alimentation à l'unité de base (CONNECT-iT).
2. Démarrez l'alarme d'épilepsie (compagnon mini) : Appuyez sur le bouton encastré "TEST" avec un stylo. Le voyant "ALARM" commence à clignoter.
3. Démarrez l'unité de base en appuyant sur le bouton encastré "PAIR" avec un stylo. Le voyant "POWER" commence à s'allumer en vert. Attendez que le voyant "ALARM" de l'alarme d'épilepsie cesse de clignoter.
4. Démarrez le mode d'appairage sur l'alarme de sécurité : consultez le manuel de l'alarme de sécurité pour obtenir des instructions.
5. Associez l'alarme d'épilepsie : appuyez sur le bouton "TEST" encastré sur l'alarme d'épilepsie. Le voyant "ALARM" commence à clignoter. Appuyez sur l'appareil pour envoyer une alarme de test. Attendez la tonalité de confirmation de l'alarme de sécurité.
6. Lorsque vous entendez la tonalité de confirmation : appuyez sur le bouton d'alarme de l'alarme de sécurité pour confirmer la connexion de l'alarme d'épilepsie. Un autre bip de confirmation se fait entendre.
7. Lorsque le voyant "ALARM" de l'alarme épilepsie a cessé de clignoter, la configuration est terminée.

Pour obtenir de plus amples informations sur l'appariement de l'appareil de téléassistance avec l'émetteur-récepteur radio, reportez-vous au manuel de l'appareil de téléassistance.

Procédure de test de l'alarme après appariement

Sur l'alarme d'épilepsie ; Simulez le mouvement en secouant l'alarme d'épilepsie. Vérifier que l'alarme a bien été reçue à la centrale d'alarme Fonctionnement

1. En cas de déclenchement d'une alarme sur le dispositif, l'émetteur-récepteur radio envoie une alarme à l'appareil de téléassistance.
2. L'appareil de téléassistance transmet cette alarme au centre de réception des alertes ou à tout autre récepteur adéquat.

Avvertissement de batterie

Le dispositif déclenche automatiquement une alarme en cas de batterie faible. Il convient alors de remplacer la batterie dans les plus brefs délais dès réception de cet avertissement.