

CAREIUM 450

MOBIEL SOCIAAL ALARM



Gebruikershandleiding
Nederlands

Inhoud

1	Veiligheidsinformatie	3
2	Belangrijke informatie	3
2.1	Medische apparatuur	4
2.1.1	Medische implantaten	4
2.2	Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)	4
3	Inhoud van de verpakking	5
4	Beschrijving	5
5	Alarmen	6
5.1	Noodalarm	6
5.2	Valalarm	6
5.3	Geofence-alarm	6
5.4	Technische alarmen	7
6	Positionering	7
7	Sms versturen	7
8	Careium 450 en dockingstation, voor- en zijaanzicht	8
9	Schema toetsen, lampjes, geluid en trillingen	9
9.1	Careium 450, het op het lichaam gedragen apparaat	9
9.2	Careium 450, dockingstation	10
10	Installatie	10
11	Configuratie en instellingen	11
11.1	Inkomende oproep toestaan	11
11.2	Antwoordmodus	11
11.3	Reservenummer alarm	11
11.4	Alarmvertraging	12
11.5	Gevoeligheid valalarm	12
11.6	Voedingsindicator	12
11.7	Zijknop	12
11.8	Geofence	12
11.9	Toegangsrechten	13
12	Onderhoud	13
12.1	Reiniging	13
12.2	Opnieuw instellen	13
13	Technische gegevens	14
13.1	Careium 450, het op het lichaam gedragen apparaat	14
13.2	Laadstation/Baken	15
13.3	Voeding	15
13.4	Omgeving	15
14	Milieu-informatie	16
14.1	Producten op de juiste manier afdanken	16
14.2	De batterijen in dit product op de juiste manier afdanken	17

15 EU-conformiteitsverklaring	17
16 Conformiteitsverklaring Verenigd Koninkrijk.....	17

1 Veiligheidsinformatie

- Gebruikers moeten extra goed letten op het risico van storing door andere systemen die in dezelfde frequentieband of aangrenzende frequentiebanden werken.
- De Careium 450 kan en mag niet worden gedemonteerd.
- Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst. Het is niet toegestaan om dit product te demonteren, te doorboren, kortsluiting van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen hoger dan 60 °C (140 °F), het bloot te stellen aan extreem lage luchtdruk, of in vuur of water te gooien om de kans op brand of brandwonden te voorkomen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften of de referentiehandleiding die bij het product wordt geleverd.
- Gebruik uitsluitend de voeding die wordt vermeld in het deel "Accessoires".
- Het stopcontact moet in de buurt van de Careium-oplader zijn geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het apparaat altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan, of als het storing of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de gewone gebruiksstand. Het apparaat mag nooit worden gebruikt bij een bedrijfstemperatuur hoger dan 40 °C of lager dan -10 °C.

2 Belangrijke informatie

Alle systemen die gebruikmaken van radio- en netwerkcommunicatie zijn onderhevig aan storing waarover de gebruiker geen controle heeft.

Producten van Careium zijn ontworpen om de impact van dergelijke storing te minimaliseren. De gebruiker moet er echter rekening mee houden dat systeemcomponenten onderhevig kunnen zijn aan storing of andere invloeden die een slechte werking kunnen veroorzaken.

Het is daarom belangrijk om regelmatig te controleren of alle onderdelen van het systeem in alle ruimtes werken, met name de radiocommunicatie. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als u een slechte werking vermoedt.

Houd het product uit de buurt van storende apparaten zoals radiozenders, mobiele telefoons, DECT-telefoons of draadloze hoofdtelefoons.

Gebruikers moeten met name alert zijn op het risico van storing door producten die op dezelfde of aangrenzende frequenties communiceren.

Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier.

2.1 Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het apparaat tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

2.1.1 Medische implantaten

Fabrikanten van medische implantaten raden een minimale afstand van 15 cm tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat aan om mogelijke storing te voorkomen. Personen die dit soort apparaten hebben, moeten zich aan het volgende houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat.

As u denkt dat er sprake van storing is, schakel de telefoon dan onmiddellijk uit. Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een medisch implantaat.

2.2 Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat het de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door de internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) worden aanbevolen, niet overschrijdt. De blootstellingsrichtlijnen voor radiogolven gebruiken een maateenheid die bekend staat als het specifiek absorptietempo of SAR.

De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg, gemiddeld over 10 gram weefsel, en bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd of staat van gezondheid. Tests voor het bepalen van SAR worden uitgevoerd in de normale gebruiksposities, waarbij het apparaat met het maximaal gecertificeerde vermogen uitzendt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

SAR lichaam: 1,373 W/kg

Bij normaal gebruik liggen de SAR-waarden voor dit apparaat ver beneden de hierboven genoemde waarden. Het uitgangsvermogen van uw mobiele apparaat wordt automatisch verlaagd als volledig vermogen niet nodig is voor de oproep, om de efficiëntie van het systeem te verbeteren en

storing op het netwerk zo beperkt mogelijk te houden. Hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

3 Inhoud van de verpakking

- Careium 450
- Laadstation/baken
- Voeding
- Draagkoord
- Verkorte handleiding

4 Beschrijving

De Careium 450 is een klein en prettig mobiel sociaal alarm met gps dat de veiligheid niet alleen thuis verbetert, maar overal waar u naartoe gaat. Het apparaat is altijd eenvoudig mee te nemen, in een zak of als hanger rond de nek, en is waterdicht (IP67). Wanneer de noodhulpknop wordt ingedrukt, wordt er een alarm naar de centrale gestuurd en via de ingebouwde luidspreker kan de gebruiker met het opgeleide personeel van de alarmcentrale praten. De functies voor gps, wifi en bakenpositionering werken allemaal samen om de positie van de gebruiker door te geven en het apparaat beschikt over geavanceerde volg- en geofencing-functies met energiebesparende technologie voor een lange batterijduur. Een mobiel sociaal alarm maakt het voor de senior gemakkelijker om een actieve levensstijl te behouden. Het alarm moet worden doorgestuurd naar een alarmcentrale, een familielid of zorgpersoneel. De dienst kan als sociaal alarm of als gps-trackingalarm worden ingesteld. Een mobiel sociaal alarm stimuleert en helpt de senior om actief te blijven en vrij buitenshuis te bewegen, terwijl hij of zij zich tegelijkertijd veilig voelt.

5 Alarmen

5.1 Noodalarm

Dit alarm kan met de noodoproepknop aan de voorkant van het apparaat worden geactiveerd. Het alarm kan worden geactiveerd door drie keer achter elkaar kort op de toets te drukken of 3 seconden lang op de toets te drukken.

5.2 Valalarm

Het valalgoritme dat in het apparaat is ingebouwd, heeft twee gevoeligheidsniveaus: hoog of normaal.

Als het apparaat een val registreert, controleert het gedurende 30 seconden na de val op beweging of stappen. Als er binnen deze periode beweging of stappen worden geregistreerd, dan annuleert het apparaat het valalarm. Deze procedure is stil en de gebruiker merkt er niets van dat het apparaat een val heeft geregistreerd en daarna geannuleerd.

Als het apparaat een val registreert, wordt de gebruiker daarna gedurende 30 seconden om de seconde gewaarschuwd met een pieptoon. Tijdens deze 30 seconden kan het valalarm door de gebruiker worden geannuleerd door op de zijknop te drukken.

NB! Een vals alarm wordt geannuleerd als er na de val beweging wordt gedetecteerd. Als het apparaat op een hard oppervlak wordt geplaatst, zoals een tafel, en dan niet wordt verplaatst, kan het een vals alarm genereren.

5.3 Geofence-alarm

Bij de Careium 450 kunnen twee soorten Geofence-alarmen worden ingesteld. Deze instellingen kunnen via i-care® online worden ingesteld. Het gebied moet zodanig worden gedefinieerd dat het doelwit, zoals een huis of een meer, zich in het midden van het gebied bevindt. De straal van het gebied moet minimaal 100 m zijn.

- Geofence-alarm IN.
 - Als het apparaat in dit gebied komt, wordt het alarm geactiveerd
 - Er kunnen twee zones voor Geofence IN worden ingesteld
- Geofence OUT
 - Als het apparaat buiten dit gebied gaat, wordt er een alarm verzonden
 - Het baken moet zich binnen dit gebied bevinden
 - Er kan één Geofence OUT-zone worden ingesteld

5.4 Technische alarmen

- Inschakelen
- Alarm uitschakelen
- Alarm voor laag batterijniveau
- Alarm voor kritisch laag batterijniveau (EOL-alarm)
- Alarm batterij vol
- Alarm transmissie testen

6 Positionering

De positie van het apparaat kan op 4 manieren worden bepaald. Via gps (en Glonass), wifi, LBS en Baken.

Het apparaat bepaalt elke 3 minuten zijn positie, behalve wanneer het stilstaat zoals in de volgende gevallen:

- Stilstaand. De definitie van stilstaand is 7 minuten zonder beweging. Beweging wordt door de versnellingsmeter in het apparaat bepaald.
- In contact met ten minste één baken.

De positionering van de satelliet heeft de hoogste prioriteit. De nauwkeurigheid is vaak ongeveer 10-100 m.

De wifipositie wordt bepaald door 2 of meer mac-adressen die worden verkregen van omliggende wifinetwerken. De nauwkeurigheid is vaak ongeveer 10-100 m.

De positie van het basisstation wordt bepaald door gegevens van 2 of meer gsm-basisstations die het apparaat binnen bereik heeft. De nauwkeurigheid is vaak minder dan 1000 m.


Baken. Als een baken dat als "thuis" is geregistreerd binnen bereik is, dan weet het systeem dat de gebruiker thuis is.

7 Sms versturen


Het apparaat kan een vooraf gedefinieerd tekstbericht naar één vooraf ingestelde ontvanger sturen. Het sms-bericht wordt verzonden door op de zijknop op het apparaat te drukken. Er wordt een geluid en een trilsignaal afgespeeld om te bevestigen dat het sms-bericht wordt verzonden.

Het sms-bericht bevat een link met een Google Maps-positie.

8 Careium 450 en dockingstation, voor- en zijaanzicht

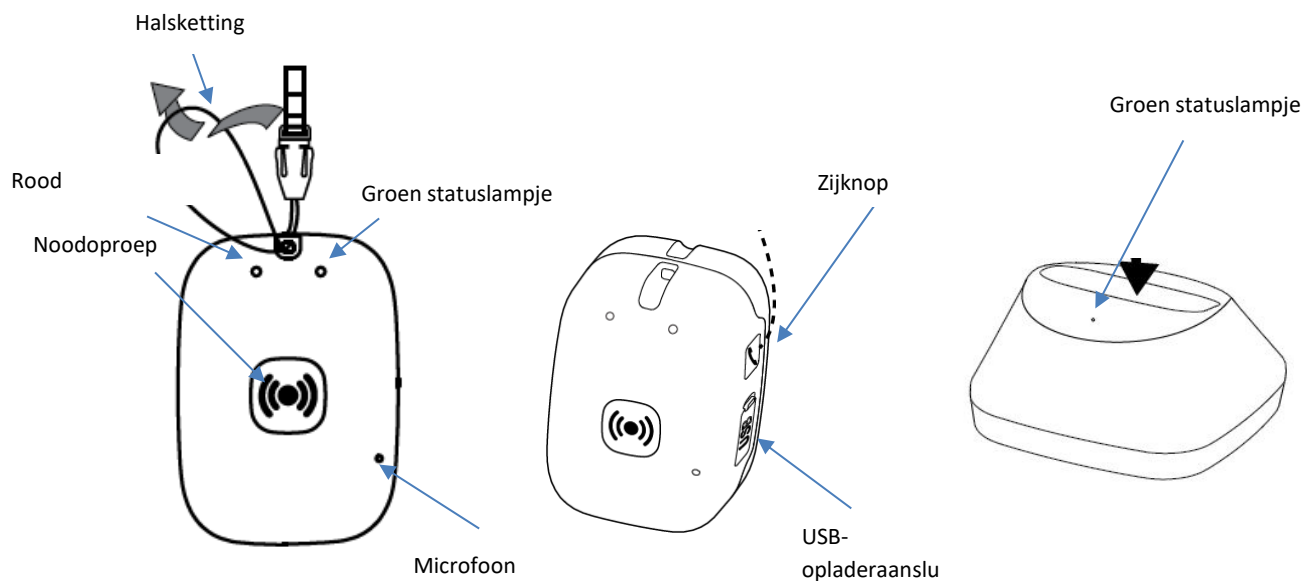

Elk indicatielampje kan slechts één kleur hebben, maar wel met verschillende patronen knipperen, afhankelijk van de status. Voorbeeld met alle drie indicatielampjes geactiveerd.

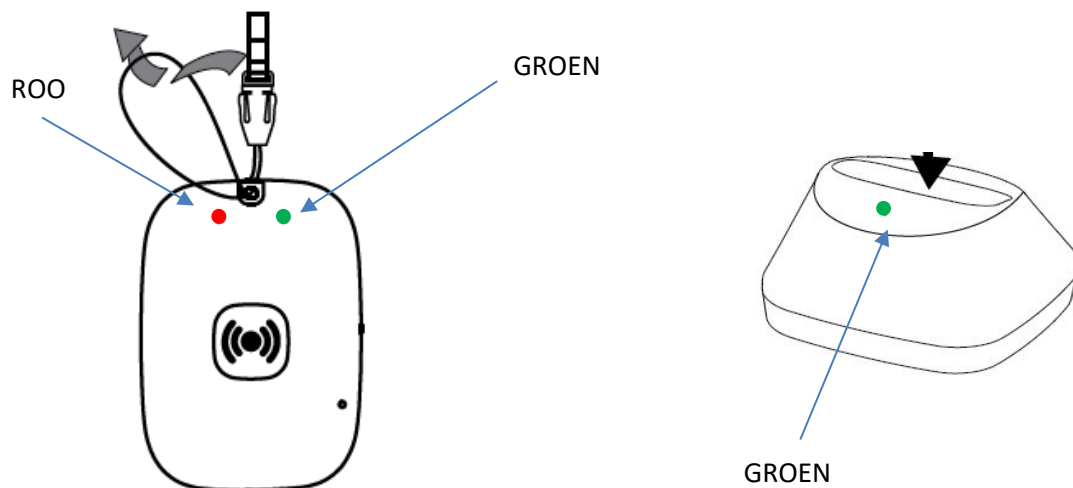

9 Schema toetsen, lampjes, geluid en trillingen

9.1 Careium 450, het op het lichaam gedragen apparaat

Status/functie	Invoer	Groen lampje	Rood lampje	Geluid	Trillingen
Inschakelen	Druk 2 seconden op de zijknop of plaats het apparaat in de oplader.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Lange trilling
Ruststand	N.v.t.	Knippert elke 3 sec. kort	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Opladen	N.v.t.	Lang knipperen om de 3 seconden	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Volledig opgeladen	N.v.t.	Brandt	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Alarm (geen vertraging)	Noodoproepknop, 3 sec. indrukken of 3 keer kort indrukken	Knippert kort totdat de oproep is verbonden (of time-out)	Knippert kort totdat de oproep is verbonden (of time-out)	Hoge toon gedurende 3 sec.	Trilling gedurende 3 sec.
Alarm (vertragingsperiode)	Noodoproepknop, 3 sec. indrukken of 3 keer kort indrukken	Knippert kort tot geannuleerd of oproep verbonden (of time-out)	Knippert kort tot geannuleerd of oproep verbonden (of time-out)	Luide toon gedurende 30 s of tot geannuleerd	Trilling gedurende 30 s of tot geannuleerd
Alarm annuleren (tijdens vertraging)	Zijknop	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Valalarm	Annuleren: Zijknop	Knippert kort tot geannuleerd of oproep verbonden (of time-out)	Knippert kort tot geannuleerd of oproep verbonden (of time-out)	Tijdens annuleringsperiode, 30 sec.: Pieptoon 1/s. Dan luide toon gedurende 3 sec.	Tijdens annuleringsperiode, 30 sec.: Korte trilling 1/s. Daarna 3 sec. trillen.
Geofence-alarm (is een stil alarm)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Mobiel netwerk niet beschikbaar	N.v.t.	N.v.t.	Dubbel rood Knippert kort	N.v.t.	N.v.t.
Batterij bijna leeg (< 20%)	N.v.t.	Brandt niet	Knippert elke 3 sec. kort	Dubbele pieptoon (één keer)	Trilling (één keer)
Inkomende oproep	Beantwoorden: Noodoproepknop	N.v.t.	N.v.t.	Belsignaal	Trillingen
Sms verzenden	Zijknop	N.v.t.	N.v.t.	Toon	Trillingen
Batterij controleren	Zijknop	> 80%: 3 keer knipperen < 80 maar > 20%: 2 keer kort knipperen	< 20%: 1 keer kort knipperen	N.v.t.	> 80%: 3 trillingen < 80 maar > 20%: 2 trillingen. < 20%: 1 trilling

Uitschakelen	Zijknop + noodstopknop gelijktijdig ingedrukt	N.v.t.	Brandt ongeveer 5 sec., maar kan wel 70 sec. duren	N.v.t.	Korte trilling gevolgd door lange trilling
--------------	---	--------	--	--------	--


9.2 Careium 450, dockingstation

Status/functie	Groen lampje
Voeding aangesloten	Brandt
Geen voeding	Uit

10 Installatie

Wanneer de Careium 450 voor het eerst in het stopcontact of na opslag wordt aangesloten, moet u het apparaat tot 3 uur laten opladen om de volledige batterijcapaciteit te bereiken.

Sluit de voeding aan op de stopcontact en sluit de voedingskabel aan op het dockingstation van de Careium 450. Het groene lampje op het dockingstation gaat branden.

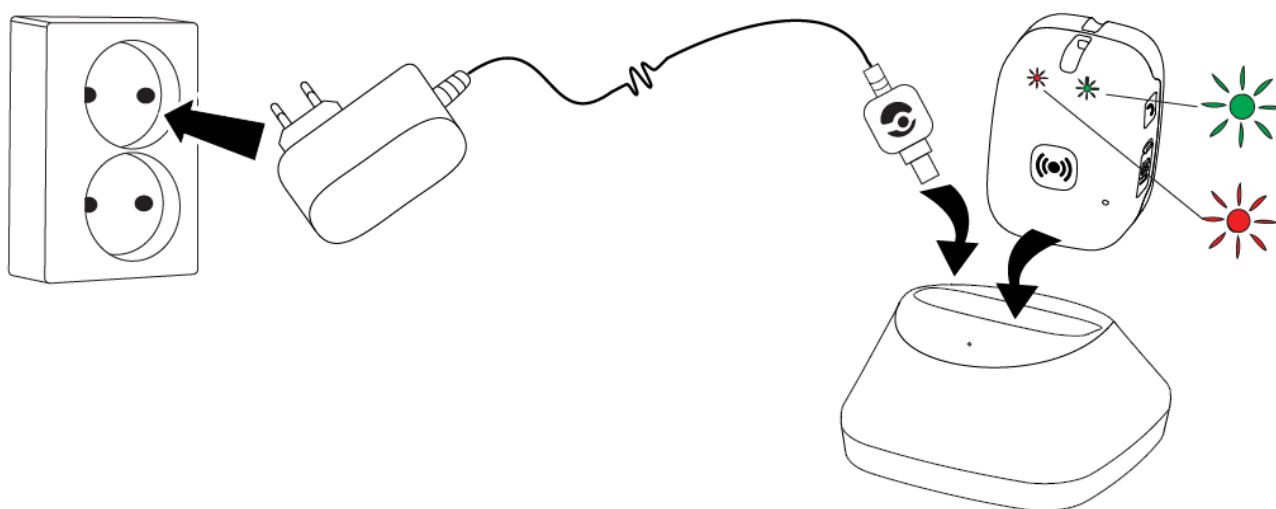

- Plaats de Careium 450 in het dockingstation
- NB! De Careium 450 start automatisch op wanneer het apparaat in het dockingstation wordt geplaatst.
- Het lampje knippert elke paar seconden twee keer rood totdat het apparaat op het netwerk is aangesloten. Na ongeveer 30-60 seconden begint het lampje groen te knipperen en kan het apparaat worden geconfigureerd in i-care-online. (Let op! Als de accu volledig is opgeladen, brandt het groene lampje)

11 Configuratie en instellingen

Careium 450 wordt ondersteund door i-care® online, de unieke online dienst van Careium die toezicht op afstand, productbeheer, firmware-upgrades, configuratie en ondersteuning biedt.

Deze dienst is 24/7 toegankelijk en het is altijd mogelijk om de status van uw Careium 450 in realtime te bekijken.

Naast gebruikers- en organisatiebeheer kunnen de volgende parameters worden ingesteld

De toegangsrechten voor de Careium 450 worden in i-care online op dezelfde manier ingesteld als bij andere Careium-producten. Er zijn echter twee nieuwe toegangsrechten beschikbaar voor de Careium 450.

- Familielid. Alleen lezen, vooral gericht op positionering
- Admin. familielid Toegang zoals hierboven, maar kan ook Geofence instellen en ontvangers van sms-alarmen beheren.

11.1 Inkomende oproep toestaan

Het is mogelijk om het apparaat direct vanaf elk type telefoon te bellen. Als Alle (standaard) is ingesteld, worden alle oproepen door het apparaat beantwoord. Als deze optie is ingesteld op UIT, worden er geen inkomende oproepen geaccepteerd. Het is ook mogelijk om 3 nummers op de witte lijst te zetten, onder reservenummer alarm 1-3, zodat deze nummers gewoon worden doorgelaten.

11.2 Antwoordmodus

Het apparaat kan zodanig worden ingesteld dat inkomende oproepen automatisch of handmatig (standaardinstelling) kunnen worden beantwoord. Als handmatig is ingesteld, wordt de oproep beantwoord via de noodknop. Alle inkomende oproepen, met uitzondering van door een alarm gegenereerde oproepen, kunnen ook met de noodknop worden beëindigd.

11.3 Reservenummer alarm

Het reservenummer van het alarm heeft twee functies. Nummers op de witte lijst zetten zoals hierboven genoemd, maar ook als reservenummer bij alarmen als de normale alarmprocedure naar de alarmontvanger mislukt.

11.4 Alarmvertraging

Deze functie is alleen van toepassing op het noodalarm (noodoproepknop is ingedrukt). Wanneer dit is ingesteld op AAN (standaardinstelling), laat het apparaat gedurende 30 seconden een alarmsignaal horen. Gedurende deze tijd kan het alarm worden geannuleerd door de zijknop 2 seconden ingedrukt te houden. Wanneer dit wordt geannuleerd, wordt er geen alarm verzonden naar de alarmontvanger of i-care-online. Dit alarm wordt niet in een logboek opgeslagen.

Als dit is ingesteld op UIT, klinkt het alarm gedurende 3 seconden en kan de gebruiker het alarm niet annuleren.

11.5 Gevoeligheid valalarm

Het valalarm kan worden ingesteld op Uit, Normaal en Hoog.

Opmerking: Bij de instelling "hoog" is het apparaat gevoeliger voor valse alarmen.

11.6 Voedingsindicator

Wanneer ingesteld op Aan (standaard), gaat de voedingsindicator op het apparaat groen knipperen wanneer in de modus Aan.

Wanneer ingesteld op Uit, wordt het groen knipperen van het lampje uitgeschakeld.

NB! Het rode indicatielampje knippert rood als de batterij minder dan 20% is, zelfs als de instelling is ingesteld op Uit.

11.7 Zijknop

Het apparaat kan een vooraf geconfigureerde sms naar één ontvanger sturen. Het sms-bericht wordt rechtstreeks van het apparaat naar de ontvanger gestuurd.

11.8 Geofence

Careium 450 kan gebruik maken van 3 geofence-gebieden.

OUT-gebied: Er wordt een alarm verzonden wanneer het apparaat buiten dit gebied komt. NB! Het laadstation/baken moet in dit geofence-gebied worden geplaatst! Er kan slechts één geofence OUT-gebied worden ingesteld.

IN-gebied: Het alarm wordt verzonden wanneer het apparaat binnen dit gebied komt. Er kunnen twee afzonderlijke geofence IN-gebieden worden ingesteld.

11.9 Toegangsrechten

De toegangsrechten voor de Careium 450 worden in i-care online op dezelfde manier ingesteld als bij andere Careium-producten. Er zijn echter twee nieuwe toegangsrechten beschikbaar voor de Careium 450.

- Familielid. Alleen lezen, vooral gericht op positionering
- Admin. familielid Toegang zoals hierboven, maar kan ook Geofence instellen en ontvangers van sms-alarmen beheren.

12 Onderhoud

12.1 Reiniging

Gebruik alleen een licht bevochtigde doek om de Careium 450, inclusief accessoires en kabels, schoon te maken. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen bij het reinigen.

12.2 Opnieuw instellen

Als de Careium 450 voor een nieuwe gebruiker opnieuw moet worden ingesteld, moet het toestel op de standaardinstellingen worden gezet en opnieuw geprogrammeerd volgens de gegevens en vereisten van de nieuwe gebruiker.

13 Technische gegevens

13.1 Careium 450, het op het lichaam gedragen apparaat

Afmetingen: 62 x 44 x 16 mm (L x B x H)

Gewicht: 45 g

IP-klasse: IP67

Temperatuur: Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +40 °C

Stroomverbruik (typisch):

- Uit-stand: 4,4 µW

- Oproepmodus: 2 W

- Netwerk stand-by: 10 mW

Accu: Li-ION, 3,7 V, 800 mAh, 3,0 Wh

Stand-bytijd: Tot 5 dagen waarbij het apparaat actief 12 uur per dag wordt gebruikt, met ten minste 1 uur buiten lopen per dag (nieuwe en volledig opgeladen batterij)

Gesprekstijd: Max. uitgangsvermogen 900-band: 3 uur

Minimaal vermogen 1800-band: 12 uur

Alarmprotocol: SCAIP, TS 50134-9 en spraakoproep

RFID, ontvanger: 865-868 MHz.

Categorie radio-ontvanger: 1

Simkaartinterface: Ingebouwde nanosimkaart

Cellulaire banden

Technologie	Band	TX-frequentie (MHz)	RX-frequentie (MHz)
GSM (2G)	GSM-900	880-915	925-960
	GSM-1800	1710-1785	1805-1880

Wifi: de wififunctie wordt alleen gebruikt om locatiegegevens te verkrijgen, deze verzendt geen signalen.

USB: Micro USB vrouwelijk (micro USB-B) (bedoeld voor Careium-gecertificeerde adapters)

13.2 Laadstation/Baken

Afmetingen:	68 x 68 x 36 mm (L x B x H)
Gewicht:	42 g
Kleur:	Blauw
RFID, zender:	865-868 MHz
USB:	Micro USB vrouwelijk (micro USB-B) (bedoeld voor Careium-gecertificeerde adapters)

13.3 Voeding

Model (EU):	A31A-050500U-EU1
Model (VK):	S003ATB0500055
Ingangsspanning:	100-240 V
Frequentie ingangswisselstroom:	50-60 Hz
Uitgangsspanning:	5,0 V DC
Uitgangsstroom:	0,55-1,0 A
Uitgangsvermogen:	2,75-5,0 W
Kabellengte:	1,5 m vaste kabel
Interface:	USB-B micro mannelijk


13.4 Omgeving

Het apparaat heeft IP-klasse 67 en is bestand tegen stofdeeltjes en water gedurende maximaal 30 minuten. Hiervoor moet de rubberen afdichting over de USB-poort goed gesloten/afgedicht zijn. NB! Als de USB-poort niet goed is gesloten, is het apparaat niet IP-geclassificeerd.

Het laadstation/het baken heeft geen IP-classificatie, en moet binnen en in een droge omgeving worden bewaard.

14 Milieu-informatie

Dit product voldoet aan de eisen van EU-richtlijn 2006/66/EG (Batterijen) en 2012/19/EU (AEEA). Deze richtlijnen regelen de productaansprakelijkheid voor recycling van batterijen, en elektrische en elektronische apparatuur om recycling te bevorderen en de hoeveelheid afval tot een minimum te beperken. De Careium 450 is voorzien van het logo met de doorgekruiste afvalcontainer, wat aangeeft dat het moet worden ingeleverd voor recycling.

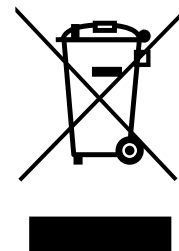

Het product kan kosteloos worden ingeleverd bij een recyclingpunt dat, rechtstreeks dan wel via een recyclingsysteem, in verbinding staat met CAREIUM of met uw distributeur. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of kijk op onze website, www.Careium.com/care/

NB! De AEEA-informatie en aanwijzingen voor recycling gelden alleen voor lidstaten van de Europese Unie. Raadpleeg in andere landen de plaatselijke wetgeving of neem contact op met de distributeur.

Vervaardigd in overeenstemming met EU-richtlijn 2011/65/EU (RoHS2).

De materialen die zijn gebruikt in de nekband voldoen aan de veiligheidseisen voor textiel van Oeko-Tex-norm 100.

14.1 Producten op de juiste manier afdanken



(Elektrisch en elektronisch afval)

(Van toepassing in landen met speciale inzamelsystemen)

Dit symbool op het product zelf, de accessoires of de gebruiksaanwijzing betekent dat het product en de elektronische accessoires (zoals opladers, headsets en USB-kabels) niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Deze onderdelen moeten afzonderlijk worden gesorteerd en gerecycled om duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen, zodat schade aan het milieu en de menselijke gezondheid wordt voorkomen. Voor vragen over hoe en waar deze producten moeten worden gerecycled, moeten particulieren contact opnemen met het verkooppunt of hun gemeente. Bedrijven moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden in de aankoopdocumentatie lezen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden gecombineerd met ander bedrijfsafval. Dit product voldoet aan de RoHS-richtlijn. Juist afdanken van de batterijen in dit product (van toepassing in landen met speciale inzamelsystemen) Dit symbool op de batterij, in de handleiding of in de verpakking geeft aan dat de batterij in het product niet mag worden afgevoerd als gewoon huishoudelijk afval. Wanneer de chemische aanduidingen Hg, Cd

of Pb worden gebruikt, betekent dit dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat dat de referentieniveaus van de EU-batterijrichtlijn 2006/66 overschrijdt. Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. De batterijen moeten afzonderlijk worden afgevoerd en gerecycled door ze in de gemeentelijke batterijcontainer te plaatsen, om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik te bevorderen.

14.2 De batterijen in dit product op de juiste manier afdanken



(Van toepassing in landen met speciale inzamelsystemen)

Dit symbool op de batterij, in de handleiding of in de verpakking geeft aan dat de batterij in het product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Wanneer de chemische aanduidingen Hg, Cd of Pb worden gebruikt, betekent dit dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat dat de referentieniveaus van de EU-batterijrichtlijn 2006/66/EG overschrijdt. Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. De batterijen moeten afzonderlijk worden afgevoerd en gerecycled door ze in de gemeentelijke batterijcontainer te plaatsen, om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik te bevorderen.

15 EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Careium dat de radioapparatuur Careium 450 voldoet aan de volgende richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU inclusief gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van Bijlage II. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende website: www.careium.com/dofc

16 Conformiteitsverklaring Verenigd Koninkrijk

Hierbij verklaart Careium dat de radioapparatuur van het type Careium 450 voldoet aan de relevante wetgeving in het Verenigd Koninkrijk.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring voor het Verenigd Koninkrijk is te vinden op de volgende website: www.careium.com/dofc



© 2021 Copyright Careium AB

Manual_Careium_450_nl_v12.docx

Careium AB, Jörgen Kocksgatan 1 B, 211 20 Malmö, Zweden

Bedrijfsidentificatienummer: 556569-9740

www.careium.com

