

CAREIUM 450

MOBILT TRYGGHETSLARM



Användarhandbok

Svenska

Innehåll

1	Säkerhetsinformation	3
2	Viktig information	3
2.1	Medicinsk utrustning	4
2.2	Specifik absorptionsnivå (SAR)	4
3	Förpackningens innehåll	5
4	Beskrivning.....	5
5	Larm	6
5.1	Nödlarm.....	6
5.2	Fallarm	6
5.3	Geostaket-larm	6
5.4	Tekniska larm	7
6	Positionering.....	7
7	Skicka SMS.....	7
8	Careium 450 och dockningsstation, framifrån och från sidan.....	8
9	Knapp, LED, ljud- och vibrationsschema.....	9
9.1	Careium 450, den kroppsburna enheten.....	9
9.2	Careium 450, dockningsstation.....	10
10	Installation	10
11	Konfiguration och inställningar	10
11.1	Tillåt inkommande samtal	11
11.2	Svarsläge	12
11.3	Backup-nummer för larm	12
11.4	Larmfördröjning	12
11.5	Känslighet för fallarm	12
11.6	Strömindikator	12
11.7	Sidoknapp	12
11.8	Geostaket.....	12
11.9	Behörighet	13
12	Underhåll	13
12.1	Rengöring.....	13
12.2	Övertagande.....	13
13	Tekniska data	14
13.1	Careium 450, den kroppsburna enheten.....	14
13.2	Laddningsstation/sändare.....	15
13.3	Strömförsörjning	15
13.4	Miljö.....	15
14	Miljöinformation.....	16
14.1	Korrekt återvinning av produkter	16
14.2	Korrekt kassering av batterier i denna produkt	17
15	EU-försäkran om överensstämmelse	17
16	Storbritannien – försäkran om överensstämmelse.....	17

1 Säkerhetsinformation

- Användare bör vara uppmärksamma på potentiella störningar från andra system som används på samma eller närliggande frekvensband.
- Careium 450 kan inte och får inte demonteras.
- Explosionsrisk föreligger om batteriet byts ut på fel sätt. För att minska risken för brand och brännskador: ta inte isär, krossa eller stick hål på telefonen, förkorta inte externa kontakter och utsätt inte telefonen för temperaturer över 60 °C, extremt lågt lufttryck samt öppen eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter eller den handbok som medföljer produkten.
- Använd endast den rekommenderade strömkälla som anges under "Tillbehör".
- Väggtaget som används måste finnas i närheten av laddningsenheten och vara lättillgängligt.
- Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition. Enheten får aldrig användas vid temperaturer över 40 °C eller under -10 °C.

2 Viktig information

Alla system som använder radio- och nätverkskommunikation utsätts för störningar som användaren saknar inflytande över.

Produkter från Careium är konstruerade för att minimera effekterna av sådana störningar. Trots detta måste användaren vara medveten om att systemets komponenter kan utsättas för störningar eller annan påverkan som kan leda till att de inte fungerar korrekt.

Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera att systemets alla delar fungerar överallt, detta gäller framför allt radiokommunikation. Kontakta återförsäljaren omgående vid misstanke om felfunktion.

Se till att produkten inte kommer i kontakt med enheter som radiosändare, mobiltelefoner, DECT-telefoner och trådlösa hörlurar.

Användare bör vara särskilt uppmärksamma på risken för störningar från produkter som kommunicerar via samma eller närliggande frekvenser.

Kontakta din leverantör för mer information.

2.1 Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Medicinska implantat

För att förhindra potentiella störningar rekommenderar tillverkare av medicinska implantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlösa telefoner och implantat. Personer som har ett medicinskt implantat ska:

- alltid hålla den trådlösa telefonen på ett avstånd om minst 15 cm från implantatet
- inte förvara telefonen i bröstfickan
- hålla den trådlösa telefonen mot det öra som sitter på motsatt sida från implantatet.

Om du misstänker att störningar förekommer ska du genast stänga av telefonen. Om du har några frågor om användningen av din trådlösa telefon i kombination med ett medicinskt implantat ska du vända dig till din vårdgivare.

2.2 Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Din mobila enhet både tar emot och sänder radiosignaler. Den är konstruerad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor (radiofrekventa elektromagnetiska fält) som rekommenderas i internationella riktlinjer från den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection). I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måttenhet som kallas för SAR, Specific Absorption Rate.

SAR-gränsvärdet för mobila enheter är 2 W/kg i genomsnitt över 10 gram kroppsvävnad, och är beräknat med en avsevärd säkerhetsmarginal för att alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd, ska vara trygga. Vid tester av SAR används standardanvändningspositioner samtidigt som telefonen sänder med sin högsta tillåtna effektnivå i alla testade frekvensband. Högsta tillåtna SAR-värden enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av denna telefonmodell är:

SAR vid kroppen: 1,373 W/kg

Vid normal användning är enhetens SAR-värden normalt långt under ovanstående gränsvärden. Detta innebär att uteffekten från din mobila enhet automatiskt minskas när full effekt inte är nödvändig för samtalet, vilket syftar till att maximera systemets effektivitet och minimera störningarna på systemet. Ju lägre uteffekt från enheten, desto lägre blir dess SAR-värde.

3 Förpackningens innehåll

- Careium 450
- Laddningsstation/Sändare
- Nätadapter
- Rem
- Snabbstartsguide

4 Beskrivning

Careium 450 är ett litet och behändigt mobilt GPS-trygghetslarm som inte bara ökar tryggheten i hemmet utan överallt där användaren rör sig. Den är alltid lätt att bära med sig, antingen i fickan eller hängande runt halsen, och den är vattentät (IP67). När man trycker på trygghetsknappen skickas ett larm till larmcentralen, och med hjälp av den inbyggda högtalartelefonen kan man kommunicera med larmcentralens utbildade personal. Genom att utnyttja en kombination av GPS, Wi-Fi och sändarens positionering får man inte bara användarens position, möjlighet till avancerad spårning och utnyttjande av trygghetszoner (sk. geostaket), utan även längre batteritid med hjälp av denna energisparande teknik. Ett mobilt trygghetslarm gör det lättare för seniorer att hålla en aktiv livsstil. Larm skickas till larmcentral, anhörig eller vårdpersonal. Tjänsten kan ställas in som ett trygghetslarm eller ett GPS-spårningslarm. Ett mobilt trygghetslarm uppmuntrar och hjälper seniorer att hålla sig aktiva och röra sig fritt utanför hemmet samtidigt som de känner sig trygga.

5 Larm

5.1 Nödlarm

Detta larm utlöses via SOS-knappen på enhetens framsida. Tre korta tryck i rad eller ett långt tryck på tre sekunder aktiverar larmet.

5.2 Fallarm

Fallalgoritmen som är inbyggd i enheten kan ha två känslighetsnivåer, hög eller normal.

Om enheten registrerar ett fall kontrollerar den om det förekommer rörelse eller steg under 30 sekunder efter att fallet inträffat. Om rörelse eller steg registreras inom denna period kommer enheten att avbryta fallarmet. Denna sekvens är tyst och användaren vet inte att enheten har registrerat ett fall och därefter annullerat det.

Om enheten registrerar ett fall avges en ljudsignal varje sekund under de kommande 30 sekunderna. Under dessa 30-tal kan fallarmet avbrytas av användaren genom att trycka på sidoknappen.

Obs! Ett falsklarm avbryts om en rörelse upptäcks efter fallet. Om enheten placeras på en hård yta, t.ex. ett bord, och sedan inte flyttas, kan detta generera ett falsklarm.

5.3 Geostaket-larm

Två typer av geostaketlarm kan ställas in i Careium 450. Inställningar görs online via i-care®. Denna virtuella inhängnad ska definieras så att målet, såsom ett hus, en sjö etc. ligger mitt i inhängnaden. Staketets radie får inte vara mindre än 100 m.

- Geostaketlarm IN.
 - Om enheten kommer innanför detta staket utlöses larmet
 - Två IN-zoner för geostaketet kan ställas in
- Geostaket UT
 - Om enheten kommer utanför detta staket utlöses larmet
 - Sändaren måste vara innanför detta staket
 - Det går att ställa in en UT-zon för geostaketet

5.4 Tekniska larm

- Påslagen
- Avstängd
- Larm för låg batterinivå
- Alarm för kritiskt låg batterinivå (EOL-larm)
- Larm om fulladdat batteri
- Testöverföringslarm

6 Positionering

Enhetens position kan fastställas på fyra olika sätt. GPS (och Glonass), wifi, LBS och via sändaren.

Var tredje minut gör enheten en positionsbestämning, förutom när den är stationär, som i följande fall:

- Statisk. Definitionen av statisk är sju minuter utan rörelse. Rörelsen bestäms av accelerometern i enheten.
- Kontakt med minst en sändare.

Satellitpositionering har högsta prioritet. Noggrannheten är ofta ca 10–100 m.

Wi-Fi-positionen bestäms av 2 eller fler mac-adresser som erhållits från omgivande Wi-Fi-nätverk. Noggrannheten är ofta ca 10–100 m.

Basstationens position bestäms av data från två eller fler GSM-basstationer som enheten har inom räckvidd. Noggrannheten är ofta mindre än 1 000 m.


Sändare. Om det finns en sändare registrerad som "hem" inom räckhåll vet systemet att användaren är hemma.

7 Skicka SMS


Enheten kan skicka ett fördefinierat textmeddelande till en fördefinierad mottagare. SMS skickas genom att trycka på sidoknappen på enheten. Ett ljud och en vibration avges för att bekräfta att SMS kommer att skickas.

SMS innehåller en länk med Google Map-position.

8 Careium 450 och dockningsstation, framifrån och från sidan

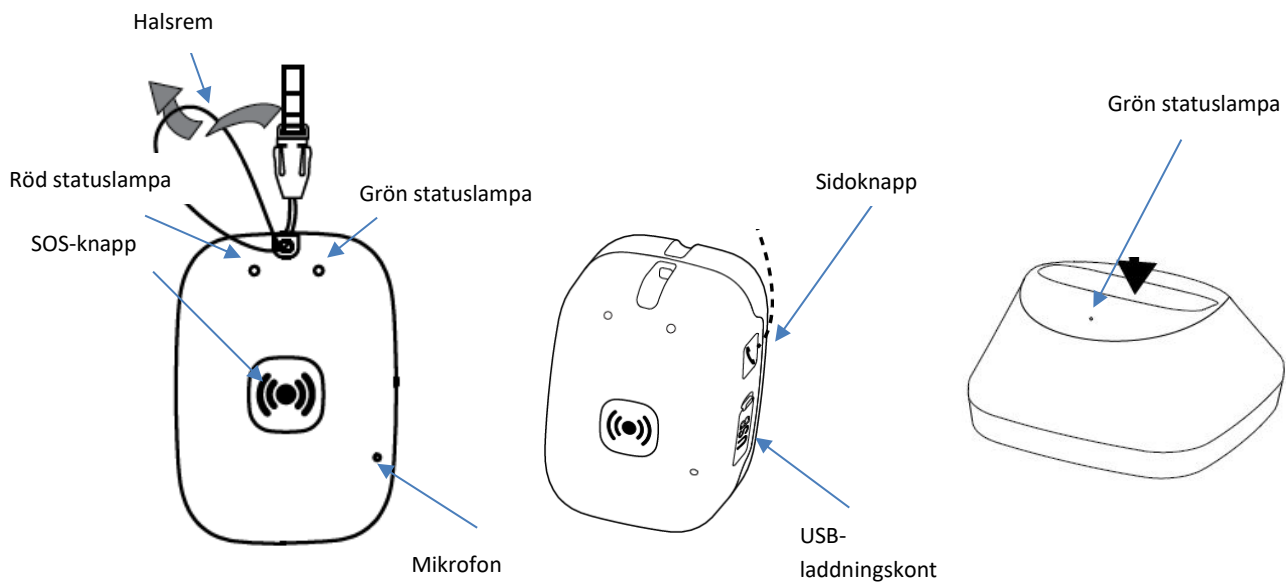

Varje indikator kan endast lysa i en färg, men den kan ha olika blinkmönster beroende på status. Exempel med alla tre indikatorerna aktiverade.

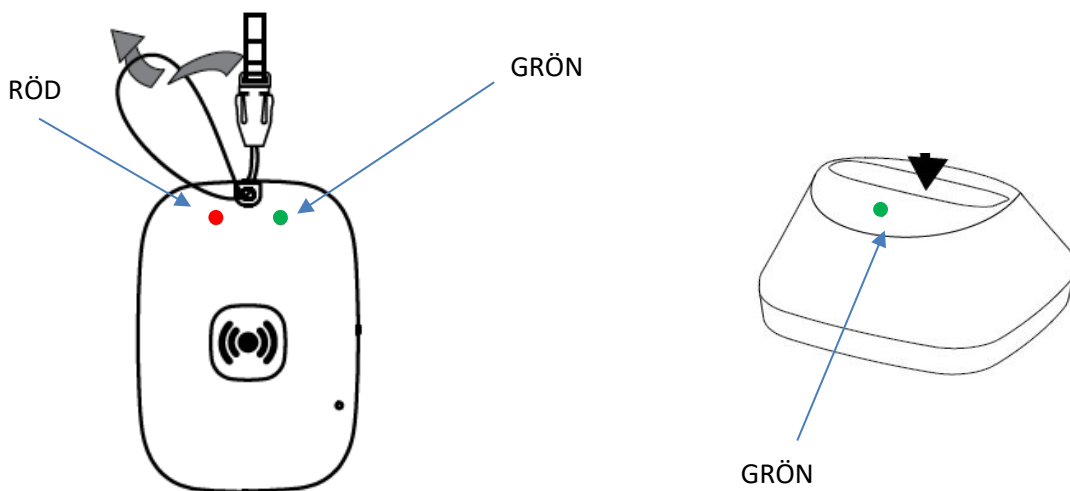

9 Knapp, LED, ljud- och vibrationsschema

9.1 Careium 450, den kroppsburna enheten

Status/funktion	Inmatning	Grön lysdiod	Röd lysdiod	Ljud	Vibration
Aktivera	Tryck på sidoknappen under två sekunder eller placera enheten i laddaren.	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Lång vibration
Viloläge	Ej tillämpligt	Kort blinkning var tredje sekund	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Laddar	Ej tillämpligt	Lång blinkning var tredje sekund	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Fulladdad	Ej tillämpligt	Tänd	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Larm (ingen fördröjning)	SOS-knapp, tryck under tre sekunder eller tre korta tryck	Kort blinkning tills samtalet kopplas (eller överskriden tidsgräns)	Kort blinkning tills samtalet kopplas (eller överskriden tidsgräns)	Hög ton i tre sekunder	Vibration i tre sekunder
Larm (fördröjningstid)	SOS-knapp, tryck under tre sekunder eller tre korta tryck	Kort blinkning tills samtalet avbryts eller kopplas (eller överskriden tidsgräns)	Kort blinkning tills samtalet avbryts eller kopplas (eller överskriden tidsgräns)	Hög ton i 30 s eller tills den avbryts	Vibration i 30 s eller tills den avbryts
Avbryt larm (under fördröjning)	Sidoknapp	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Fallarm	Avbryt Sidoknapp	Kort blinkning tills samtalet avbryts eller kopplas (eller överskriden tidsgräns)	Kort blinkning tills samtalet avbryts eller kopplas (eller överskriden tidsgräns)	Under ångerperioden, 30 s: Pip 1/s. Sedan hög ton i tre sekunder	Under ångerperioden, 30 s: Kort vibration 1/s. Sedan vibration i tre sekunder.
Geostaket-larm (tyst larm)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Mobilnät ej tillgängligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Kort, dubbel röd blinkning	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Låg batterinivå (< 20 %)	Ej tillämpligt	Inte tänd	Kort blinkning var tredje sekund	Dubbelpip (en gång)	Vibration (en gång)
Inkommande samtal	Svar: SOS-knapp	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ringsignal	Vibration
Skicka SMS	Sidoknapp	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Signal	Vibration
Kontrollera batteriet	Sidoknapp	> 80 %: Tre blinkningar < 80 % men > 20 %: Två korta blinkningar	< 20 %: 1 kort blinkning	Ej tillämpligt	> 80 %: Tre vibrationer < 80 % men > 20 %: 2 vibrationer. < 20 %: En vibration

Stänga av	Samtidigt tryck på sidoknapp och nödstoppsknapp	Ej tillämpligt	Tänd ca 5 s, men kan vara upp till 70 s	Ej tillämpligt	Kort vibration följt av lång vibration
-----------	---	----------------	---	----------------	--


9.2 Careium 450, dockningsstation

Status/funktion	Grön lysdiod
Strömansluten	Tänd
Ingen ström	Av

10 Installation

När Careium 450 ansluts för första gången eller efter förvaring ska den laddas i tre timmar för att uppnå full batterikapacitet.

Anslut nätadaptern till vägguttaget och sätt in strömsladden i nätuttaget på Careium 450 dockningsstation. Den gröna lysdioden på dockningsstationen tänds.

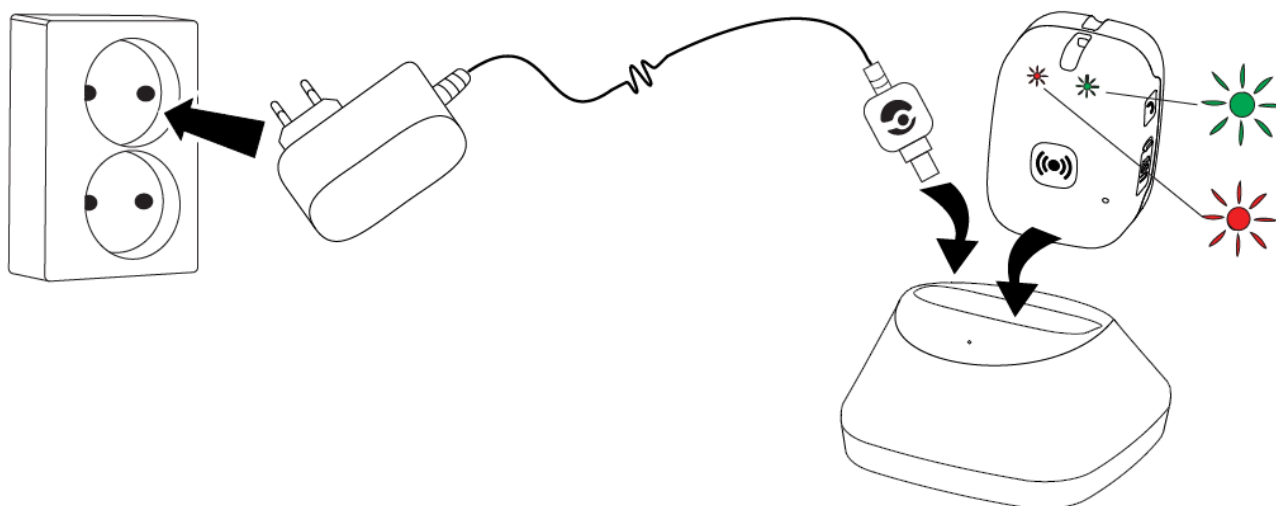

- Placera Careium 450 på dockningsstationen
- Obs! Careium 450 startar automatiskt när den placeras på dockningsstationen.
- Lysdioden blinkar rött två gånger med några sekunders mellanrum tills den är ansluten till nätverket. Efter ca 30–60 sekunder börjar den blinka grönt och är nu redo att konfigureras i i-care-online. (Obs! När batteriet är fulladdat lyser den gröna lampan)

11 Konfiguration och inställningar

Careium 450 stöds av i-care® online, Careiums unika webbaserade tjänst som tillhandahåller fjärrövervakning, produkthantering, programuppgraderingar, konfiguration och support.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och du kan alltid se statusen på din Careium 450 i realtid.

Utöver administration av användare och organisation kan följande parametrar ställas in. Åtkomsträttigheterna för Careium 450 konfigureras i i-care online på samma sätt som andra Careium-produkter. Det finns dock två nya åtkomsträttigheter för Careium 450.

- Släkting. Endast visning, med fokus på positionering
- Släkt admin. Åtkomst enligt ovan, men även med möjlighet att ställa in geostaket och administrera mottagare av SMS-larm.

11.1 Tillåt inkommande samtal

Det går att ringa enheten direkt från vilken typ av telefon som helst. Om inställningen är Alla (standard) kommer alla samtal att besvaras av enheten. Om AV är valt accepteras inga inkommande samtal. Det är också möjligt att frilista tre nummer, med larmbackup för nummer 1–3, för att bara släppa igenom dessa nummer.

11.2 Svarsläge

Inkommande samtal kan ställas in för att besvaras automatiskt eller manuellt (standardinställning). Om den är inställd på manuellt besvaras samtalet med nödstoppsknappen. Alla inkommande samtal, förutom larmgenererade samtal, kan också avslutas via nödknappen.

11.3 Backup-nummer för larm

Larmbackupnumret har två funktioner. Frilistning som nämnts ovan, men även som larmbackupnummer om den normala larmsekvensen till larmmottagaren misslyckas.

11.4 Larmfördröjning

Funktionen gäller endast för nödlarm (SOS-knappen trycks in).

Om den är inställd på ON (standardinställning) avger enheten en larmsignal i 30 sekunder. Under denna tid kan larmet avbrytas genom att hålla sidoknappen intryckt i två sekunder. Om den avbryts skickas inget larm till larmmottagaren eller i-care-online. Detta larm loggregistreras inte.

Om AV är valt kommer larmet att ljuda i tre sekunder och användaren kan inte avbryta larmet.

11.5 Känslighet för fallarm

Fallarmet kan ställas till Av, Normal och Hög.

Obs! Vid inställning på hög är enheten känsligare för falsklarm.

11.6 Strömindikator

När enheten är aktiverad, inställd på On (På), (standard) blinkar strömindikatorn grönt i påslaget läge.

När den är inställd på Off (Av) stängs den gröna blinkningen av.

Obs! Den röda indikatorlampan blinkar rött när batterinivån är under 20 %, även om den är inställd på Off (Av).

11.7 Sidoknapp

Enheten kan skicka ett förkonfigurerat SMS till en mottagare. SMS skickas direkt från enheten till mottagaren.

11.8 Geostaket

Careium 450 kan använda 3 geostaket.

UT-staket: Larmet skickas när enheten flyttas utanför detta staket. Obs!

Laddningsenhet/sändare måste placeras innanför detta geostaket! Endast ett UT-staket kan definieras.

IN-staket: Larmet skickas när enheten flyttas innanför detta staket. Två separata IN-staket kan definieras.

11.9 Behörighet

Åtkomsträttigheterna för Careium 450 konfigureras i i-care online på samma sätt som andra Careium-produkter. Det finns dock två nya åtkomsträttigheter för Careium 450.

- Släkting. Endast visning, med fokus på positionering
- Släkt admin. Åtkomst enligt ovan, men även med möjlighet att ställa in geostaket och administrera mottagare av SMS-larm.

12 Underhåll

12.1 Rengöring

Använd endast en lätt fuktad trasa vid rengöring av Careium 450, inklusive tillbehör och kablar. Använd inte starka rengöringsmedel eller lösningsmedel vid rengöring.

12.2 Övertagande

Om Careium 450 övertas av en ny användare ska den återställas till standardinställningarna och omprogrammeras i enlighet med den nya användarens personliga uppgifter och behov.

13 Tekniska data

13.1 Careium 450, den kroppsburna enheten

Mått: 62 x 44 x 16 mm (L x B x H)

Vikt: 45 g

IP-klass: IP67

Temperatur: Drifttemperatur -10°C till +40°C

Strömförbrukning (normalt):

- Frånläge: 4,4 µW

- Samtalsläge: 2 W

- Viloläge ansluten: 10 mW

Batteri: Li-ION, 3,7 V, 800 mAh, 3,0 Wh

Batteritid i viloläge: Upp till 5 dagar med enheten aktivt använd 12 timmar per dag, med minst 1 timmes utomhuspromenad varje dag (nytt och fulladdat batteri)

Taltid: 900-band max. uteffekt: 3 timmar

1800-band min. effekt: 12 timmar

Larmprotokoll: SCAIP, TS 50134-9 och röstsamtal

RFID, mottagare: 865-868 MHz.

Radiomottagarkategori: 1

SIM-kortgränssnitt: inbyggt nano-SIM

Cellband

Teknik	Band	TX-frekvens (MHz)	RX-frekvens (MHz)
GSM (2G)	GSM-900	880-915	925-960
	GSM-1800	1710-1785	1805-1880

Wifi: Wifi-funktionen används endast för att inhämta platsinformation och sänder inte signaler.

USB: Mikro-USB hona (Micro USB-B) (avsedd för Careium-certifierade adaptrar)

13.2 Laddningsstation/sändare

Mått:	68 x 68 x 36 mm (L x B x H)
Vikt:	42 g
Färg	Blå
RFID, sändare:	865-868 MHz
USB:	Mikro-USB hona (Micro USB-B) (avsedd för Careium-certifierade adaptrar)

13.3 Strömförsörjning

Modell (EU):	A31A-050500U-EU1
Modell (UK):	S003ATB0500055
Inspänning:	100–240 V
Ingående växelströmsfrekvens:	50–60 Hz
Utpänning:	5,0 VDC
Utström:	0,55–1,0 A
Uteffekt:	2,75–5,0 W
Kabellängd:	1,5 m fast kabel
Gränssnitt:	Micro-USB-B hane


13.4 Miljö

Enheten har IP-klass 67 och tål dammpartiklar och vatten i upp till 30 minuter. Detta kräver att gummitätningen över USB-porten är ordentligt stängd/förseglad. Obs! Om USB-porten inte är ordentligt stängd är enheten inte IP-klassad.

Laddaren/sändaren har ingen IP-klassning och ska förvaras inomhus och i torr miljö.

14 Miljöinformation

Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktiv 2006/66/EG (batterier) och 2012/19/EU (WEEE). Dessa direktiv reglerar produktansvaret för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier, i syfte att öka återvinningen och minimera avfallet. Careium 450 är märkt med den överkorsade soptunnesymbolen, vilket innebär att den ska lämnas in för återvinning.

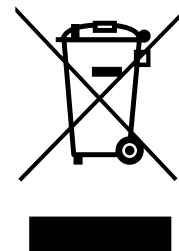

Det betyder att produkten kan returneras till lämplig kommunal återvinningscentral, till Careium eller till återförsäljaren. Detaljerade anvisningar kan du få av återförsäljaren eller på vår webbplats www.careium.com

Obs! WEEE-informationen och återvinningsanvisningarna gäller endast EU-medlemsländer. För övriga länder, kontrollera gällande lokal lagstiftning eller kontakta återförsäljaren.

Tillverkad i enlighet med EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS2).

Materialen i halsremmen uppfyller kraven på textilsäkerhet i standarden Oeko-Tex 100.

14.1 Korrekt återvinning av produkter



(El- och elektronikavfall)

(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på själva produkten, dess tillbehör eller bruksanvisning innebär att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kablar) inte får kastas i hushållssoporna. För att undvika negativ inverkan på miljön och människors hälsa ska dessa delar sorteras separat och återvinnas för att främja hållbar återanvändning av material. Vid frågor om hur och var dessa produkter ska återvinnas ska privatpersoner kontakta inköpsställe eller sin kommun. Företag ska kontakta sin leverantör och läsa villkoren i inköpsdokumentationen. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med övrigt kommersiellt avfall. Denna produkt överensstämmer med RoHS-direktivet. Korrekt kassering av batterierna i denna produkt (gäller i länder med särskilda insamlingssystem): Denna symbol på batteriet, i bruksanvisningen eller på förpackningen anger att batteriet i produkten inte får kastas i det vanliga hushållsavfallet. I de fall de förekommer innebär kemikaliebeteckningarna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som överstiger referensnivåerna i EU:s batteridirektiv 2006/66. Om batterierna inte kasseras på rätt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön. För att skydda naturresurser och främja återanvändning ska batterierna kasseras separat och återvinnas genom att de placeras i korrekt återvinningsbehållare.

14.2 Korrekt kassering av batterier i denna produkt



(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Den här symbolen på batteriet, i bruksanvisningen eller på förpackningen betyder att batteriet i produkten inte får kastas i det vanliga hushållsavfallet. I de fall de förekommer innebär kemikaliebeteckningarna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som överstiger referensnivåerna i EU:s batteridirektiv 2006/66/EG. Om batterierna inte kasseras på rätt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön. För att skydda naturresurser och främja återanvändning ska batterierna kasseras separat och återvinnas genom att de placeras i korrekt återvinningsbehållare.

15 EU-försäkras om överensstämmelse

Careium AB försäkras härmed att radioutrustningen i Careium 450 överensstämmer med följande direktiv: 2014/53/EU och 2011/65/EU inklusive delegerat direktiv (EU) 2015/863 Bilaga II. Fulltextversionen av EG-försäkras om överensstämmelse finns tillgänglig via följande webbadress: www.careium.com/dofc

16 Storbritannien – försäkras om överensstämmelse

Careium försäkras härmed att radioutrustningen i Careium 450 överensstämmer med gällande brittisk lagstiftning.

Fulltextversionen av "Storbritannien – försäkras om överensstämmelse" finns tillgänglig via följande webbadress: www.careium.com/dofc



© 2021 Copyright Careium AB
Manual_Careium_450_sv_v12.docx
Careium AB, Jörgen Kocksgatan 1B, 211 20 Malmö
Organisationsnummer: 556569-9740

www.careium.com

